

ORTHOFAB



CATALOGUE DES HORS-STANDARDS OASIS MODÈLES 2021-2026

oasis_{pc} oasis_{pcm} oasis_{pp} oasis_{pc-03}

Hors-Standards préapprouvés (HSP)

LES PRIX DES HSP SONT VALIDES POUR VOS DEMANDES À LA RAMQ

SVP, prendre note que les prix pour les hors-standards préapprouvés affichés ici sont valides et peuvent être utilisés pour vos demandes à la RAMQ directement. Vous pouvez les utiliser sans devoir attendre une soumission de notre part.

HORS-STANDARDS PRÉAPPROUVÉS	NUMÉRO DE PIÈCE	COÛT
Repose-pieds en aluminium	HSP-124XX-31	230\$/paire
Support de canne	HSP-PORTECANNE-OASIS	75\$

Table des matières

Hors-Standards préapprouvés (HSP)	2
DOSSIER.....	5
Hauteur des montants de dossier (cannes) sur-mesure	5
Dossier rabattable vers l'avant	6
Dossier 1po plus large que l'assise	7
Dossier 1po plus étroit que l'assise	8
Ajout du dossier dynamique.....	9
SIÈGE.....	10
Siège rigide plus grand que la profondeur de siège.....	10
APPUI-TÊTE.....	11
Ancrage d'appui-tête sur le dossier	11
Ancrage d'appui-tête pivotant.....	12
ACCOUDOIR.....	13
Garniture inversée	13
Extension d'appui-bras	14
Appui-bras en « U » renforcés	15
Hauteur d'ajustement 6 à 8 pouces	16
Configuration gauche/droite différente.....	17
Déclencheur tétra	18
Compensateur selon le mouvement du dossier.....	19
Espaceurs pour élargir la largeur d'assise.....	20
Appui-bras suivant le dossier motorisé	21
REPOSE-JAMBES	22
Angle d'inclinaison sur-mesure	22
Ajout de la palette centrale non-motorisée.....	23
Configuration gauche/droite différente.....	24
Déclencheur sur-mesure.....	25
Longueur d'ajustement sur-mesure.....	26
Repose-pieds en aluminium.....	27
Palette centrale sur-mesure	28
Appui-mollet pour palette centrale	29
Cornière d'appui-jambe renforcée	30
Protecteur compatible pour appui-pied	31
CEINTURE	32
Boucle de ceinture style avion.....	32
BASCULE D'ASSISE	33
Bloqueur de bascule antérieure et postérieure	33
ACCESSOIRES ÉLECTRONIQUES	34
Contrôle externe pour 1 accessoire.....	34

Interrupteurs externes	35
Boîtier de contrôle d'accessoires à 5 interrupteurs	36
Boîte de commande opérée par un assistant	37
Module IOM.....	38
Chargeur USB	39
Programmeur sans-fil R-NET	40
BOITES DE COMMANDE	41
Boîtier de commande LED avec option lumières	41
Boîtier de commande sans potentiomètre et sans Tuggle.....	42
Boîtier de commande de type « Champignon ».....	43
Boîtier de commande de type « Micro-Joystick »	44
Boîtier de commande de type « Heavy Duty ».....	45
Modification de la configuration des boutons de commandes	46
EXTENSION DE MANETTE	47
Allonge de l'interrupteur de bascule de type «Tuggle».....	47
Embout de boîtier de commande.....	48
COMMANDES ADAPTÉES	49
Contrôle pied	49
Contrôle céphalique à capteurs de proximité.....	50
Contrôle menton	51
Contrôle plastron	52
Contrôle souffle	53
ACCESSOIRES	54
Support de canne.....	54
Support de bonbonne à oxygène.....	55
Support à soluté	56
Rétroviseur.....	57
Porte-gobelet	58
Protecteur OMNI2	59

DOSSIER

Hauteur des montants de dossier (cannes) sur-mesure




Description: Les montants de dossier sont ajustables par plage de hauteur:

18-21po (standard au formulaire),
21-24po (standard au
formulaire), 24-26po (hors-
standard)
Autres plages sur-mesure (hors-standard)

Note: La hauteur maximale est de 26 pouces

<i>Oasis PC</i>	<i>Oasis PCM</i>	<i>Oasis PP</i>	<i>Oasis PC-03</i>
✓	✓	✓	✓


Dossier rabattable vers l'avant

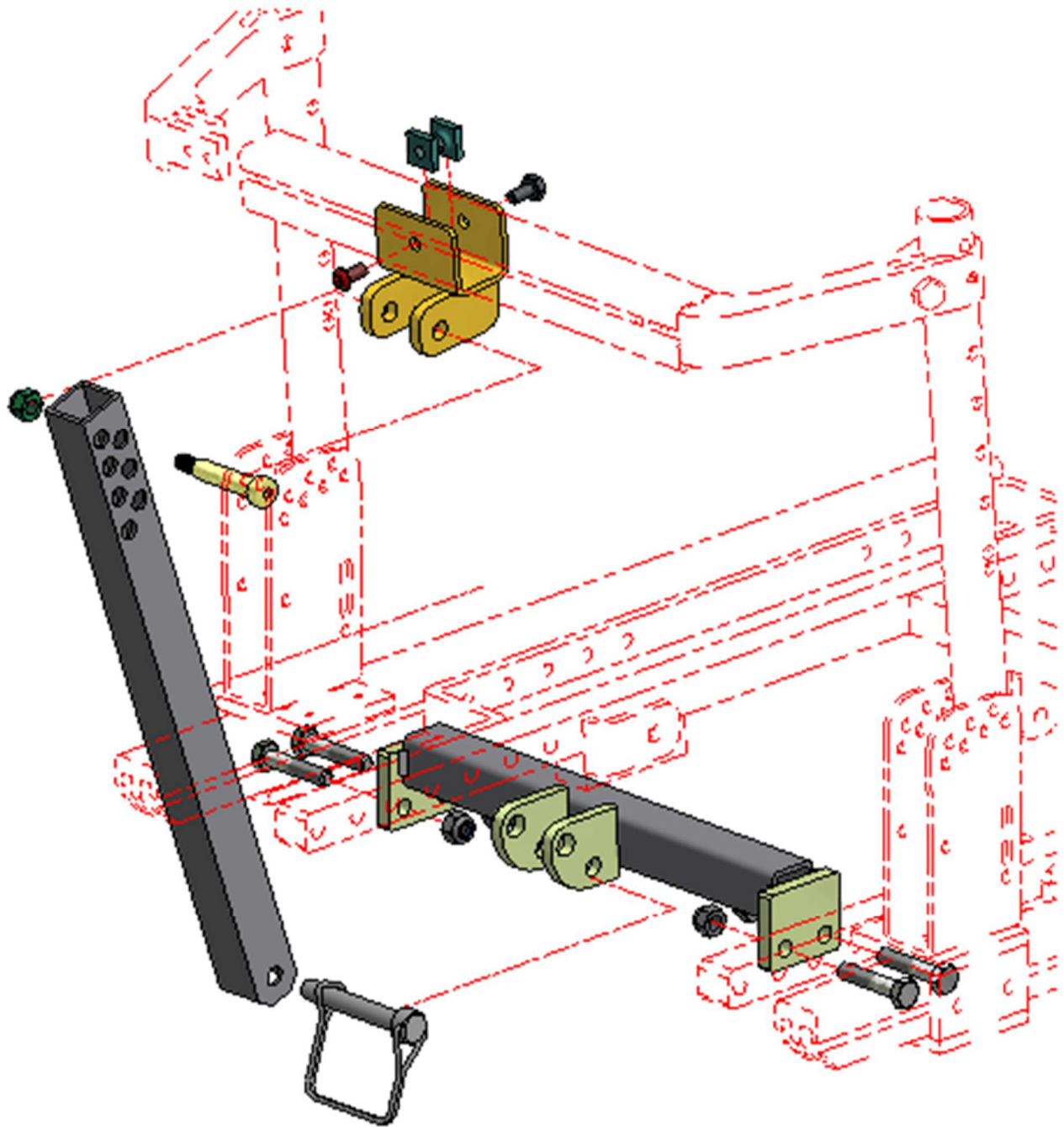

Description: Mécanisme permettant de rabattre le dossier vers le siège afin de réduire la hauteur hors-tout du fauteuil et ainsi faciliter le transport.

<i>Oasis PC</i>	<i>Oasis PCM</i>	<i>Oasis PP</i>	<i>Oasis PC-03</i>
			


Dossier 1po plus large que l'assise

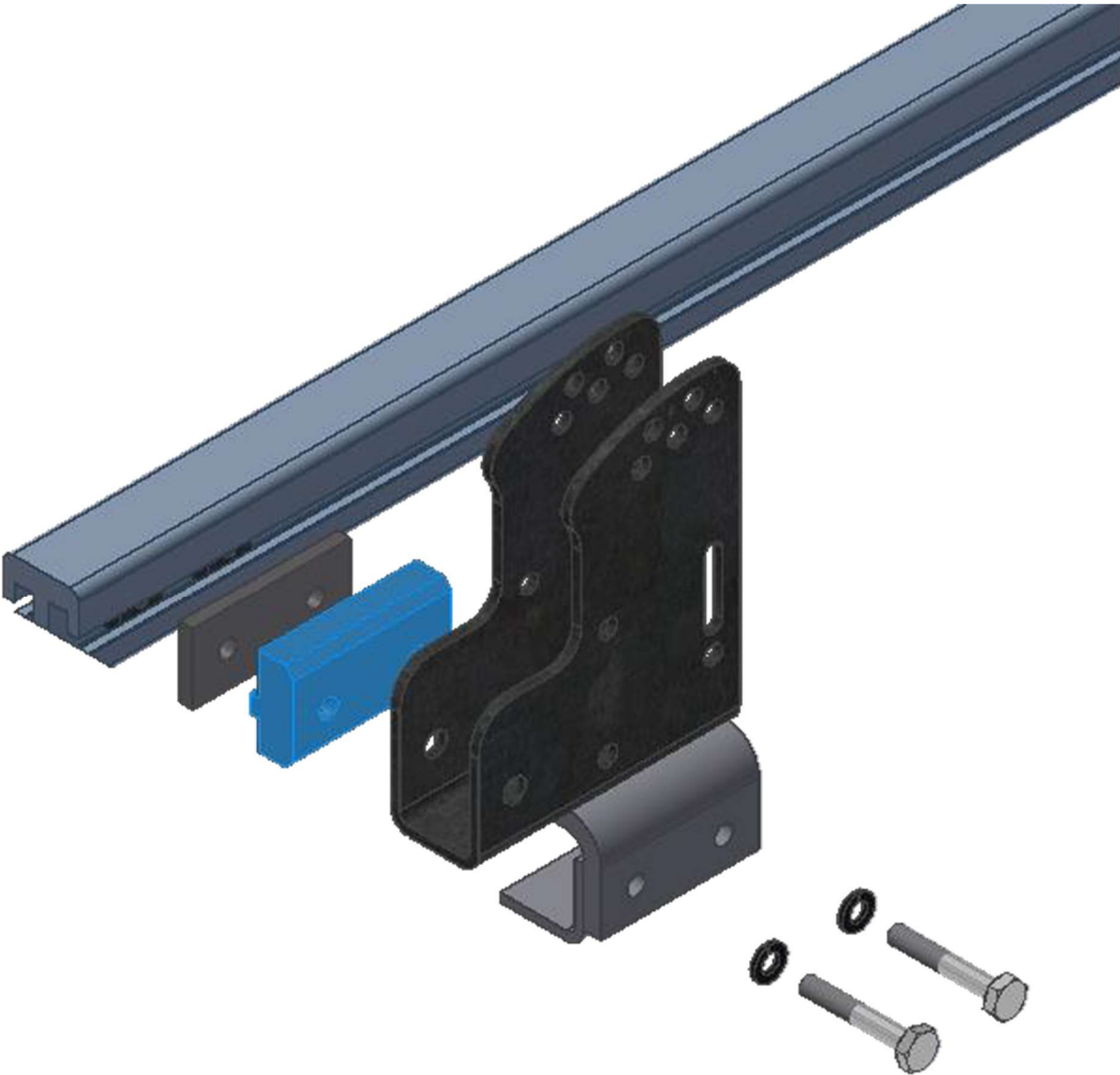

Description: Installation d'un espaceur pour augmenter la distance entre les montants de dossier. Le dossier devient donc 1 pouce plus large que l'assise.

Oasis PC	Oasis PCM	Oasis PP	Oasis PC-03
✓	✓	✓	✓


Dossier 1po plus étroit que l'assise

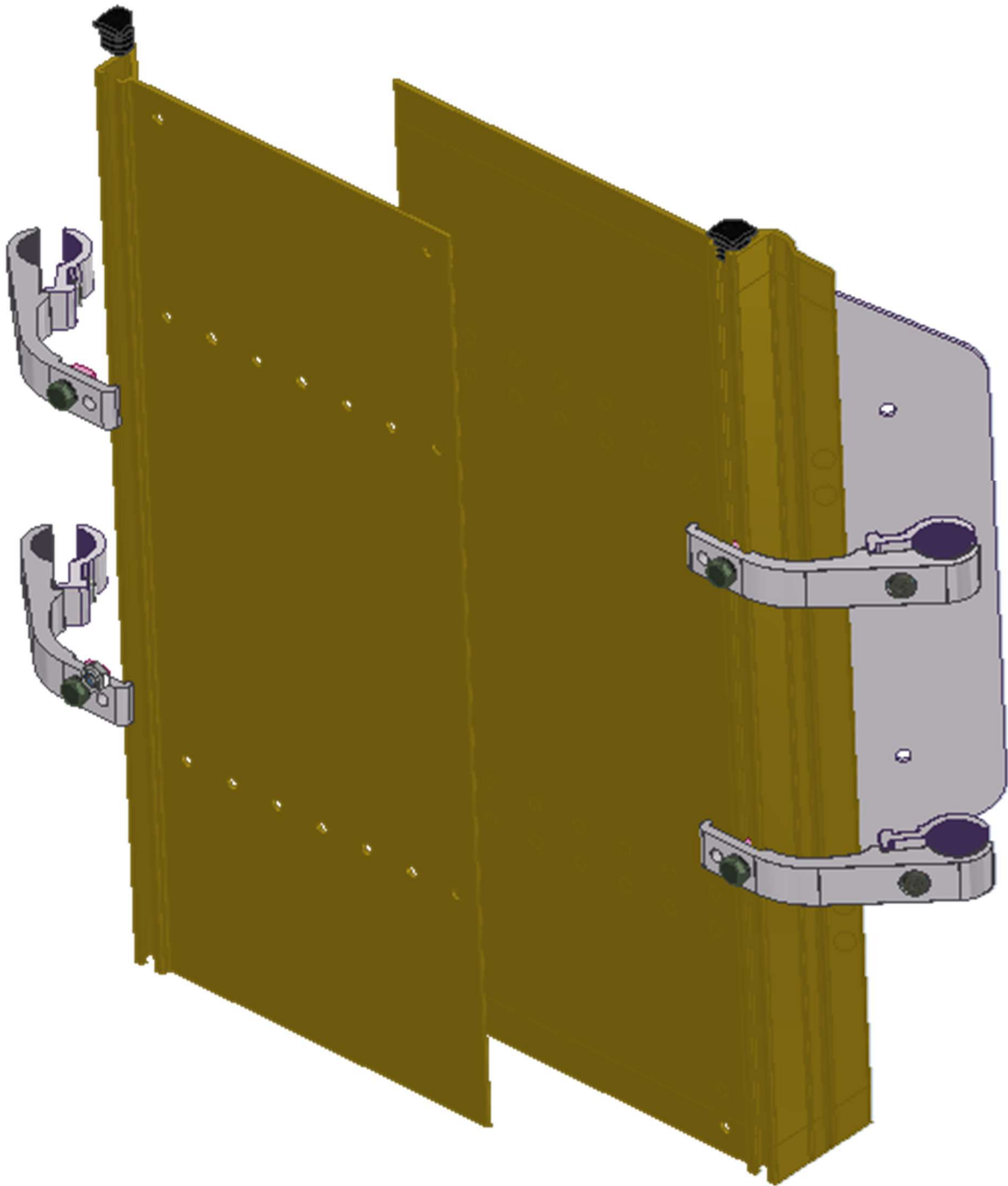

Description: Installation des plaques de dossier rembourrée et profilé afin qu'elles soient 1 pouce plus étroite. Le dossier devient alors 1 pouce plus étroit que l'assise.

<i>Oasis PC</i>	<i>Oasis PCM</i>	<i>Oasis PP</i>	<i>Oasis PC-03</i>
✓	✓	✓	✓

Ajout du dossier dynamique

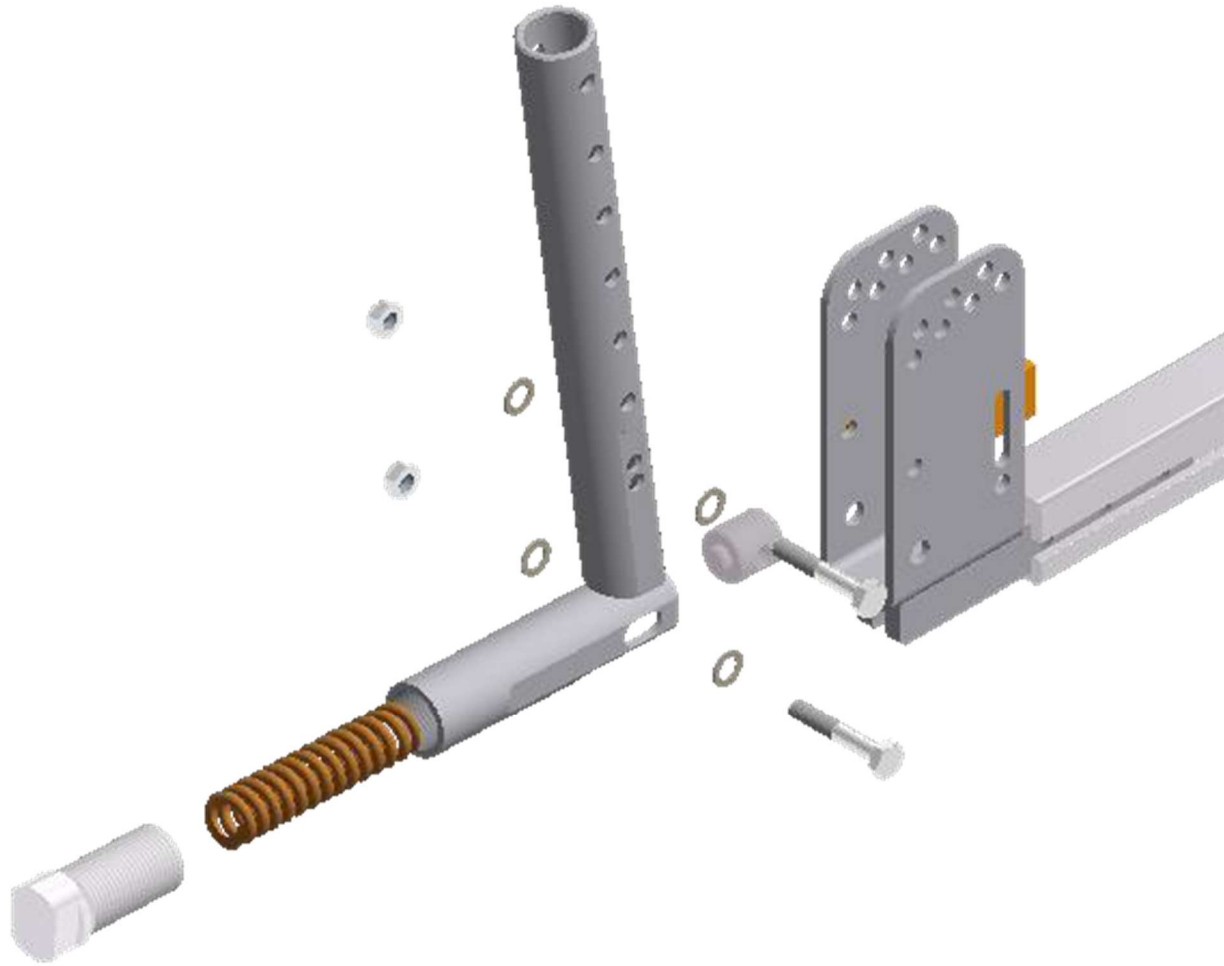

Description:

Le dossier dynamique est un mécanisme à ressort installé dans les montants de dossier et qui permet l'absorption des chocs dans le cas de spasmes par exemple.

Le dossier dynamique est offert avec 3 options de tension de ressort, différenciables par la couleur du ressort:

- Tension souple (rouge)
- Tension standards (bronze)
- Tension forte (vert)

<i>Oasis PC</i>	<i>Oasis PCM</i>	<i>Oasis PP</i>	<i>Oasis PC-03</i>
✓	✓	✓	✓

SIÈGE

Siège rigide plus grand que la profondeur de siège




Description: Installation d'une plaque rigide de profondeur de 2po supérieur à la profondeur de l'assise. De cette façon, l'utilisateur est positionné plus vers l'avant du fauteuil et les jambes peuvent former un angle de 90 degrés.

Oasis PC	Oasis PCM	Oasis PP	Oasis PC-03
✓	✓	✓	✓

APPUI-TÊTE


Ancrage d'appui-tête sur le dossier

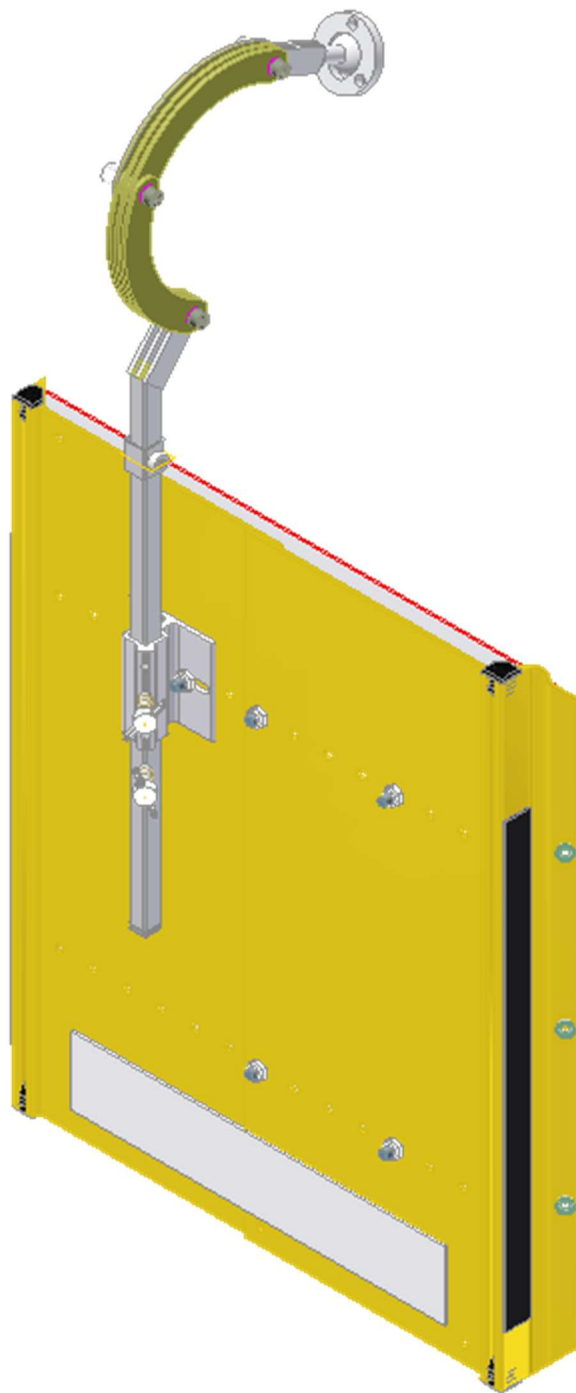

Description: Fixation de l'ancrage d'appui-tête directement sur la plaque de dossier rigide

<i>Oasis PC</i>	<i>Oasis PCM</i>	<i>Oasis PP</i>	<i>Oasis PC-03</i>
✓	✓	✓	✓

Ancrage d'appui-tête pivotant


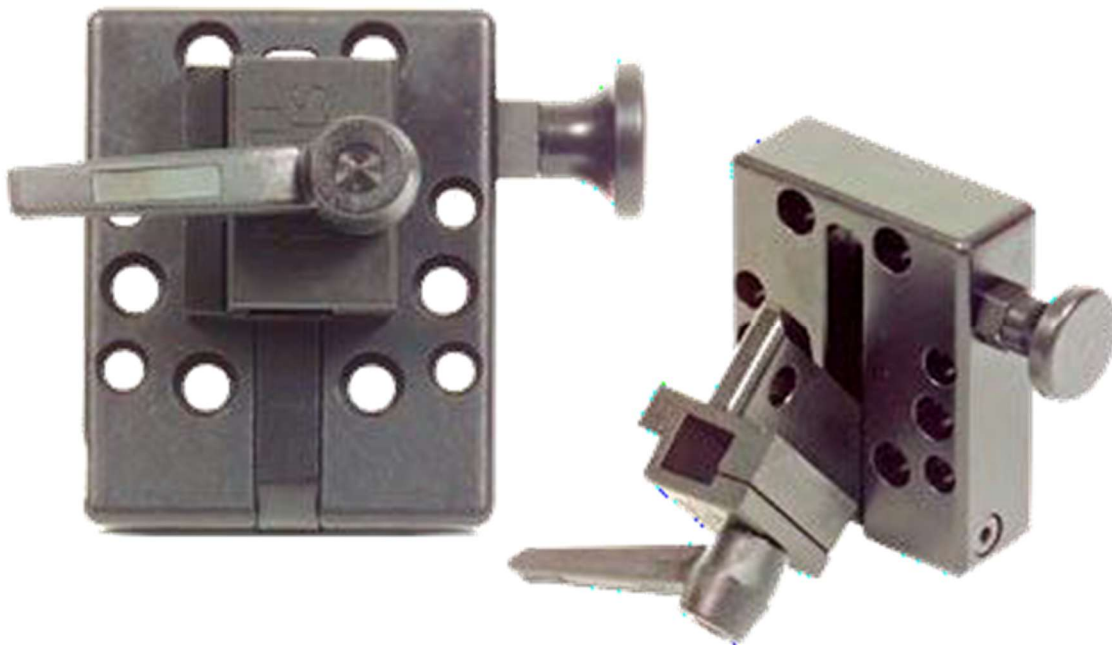


Description: Ancrage d'appui-tête pivotant vers l'arrière. L'appui-tête peut donc être rabattu vers l'arrière puis remis en place sans être retiré du fauteuil.

<i>Oasis PC</i>	<i>Oasis PCM</i>	<i>Oasis PP</i>	<i>Oasis PC-03</i>
✓	✓	✓	✓

ACCOUDOIR

Garniture inversée

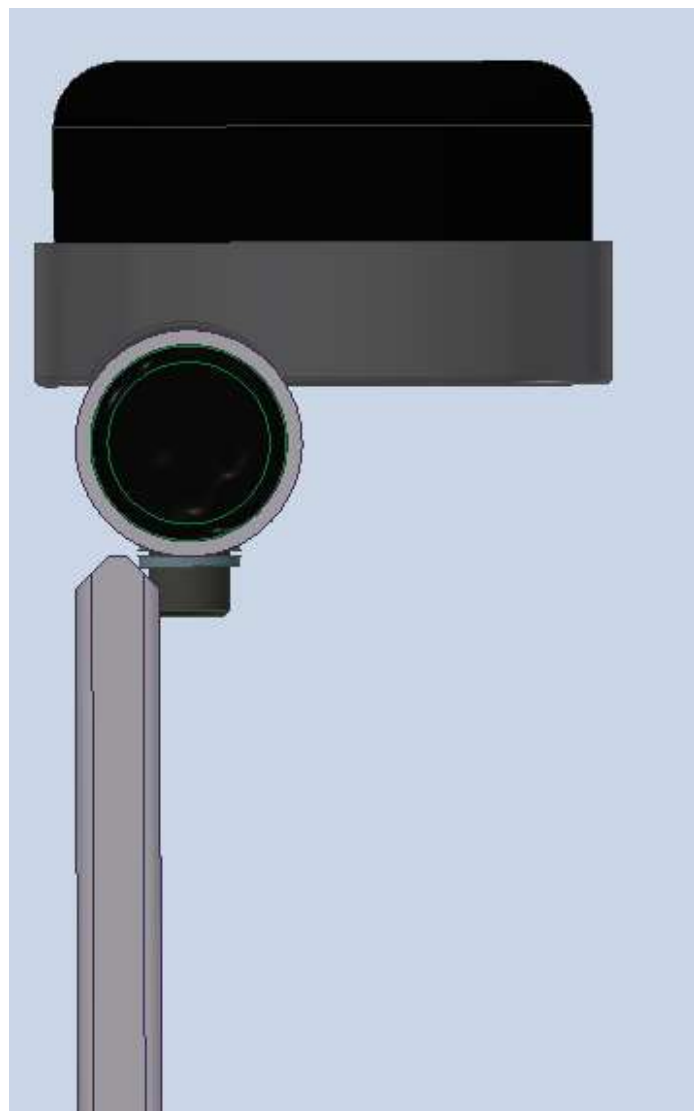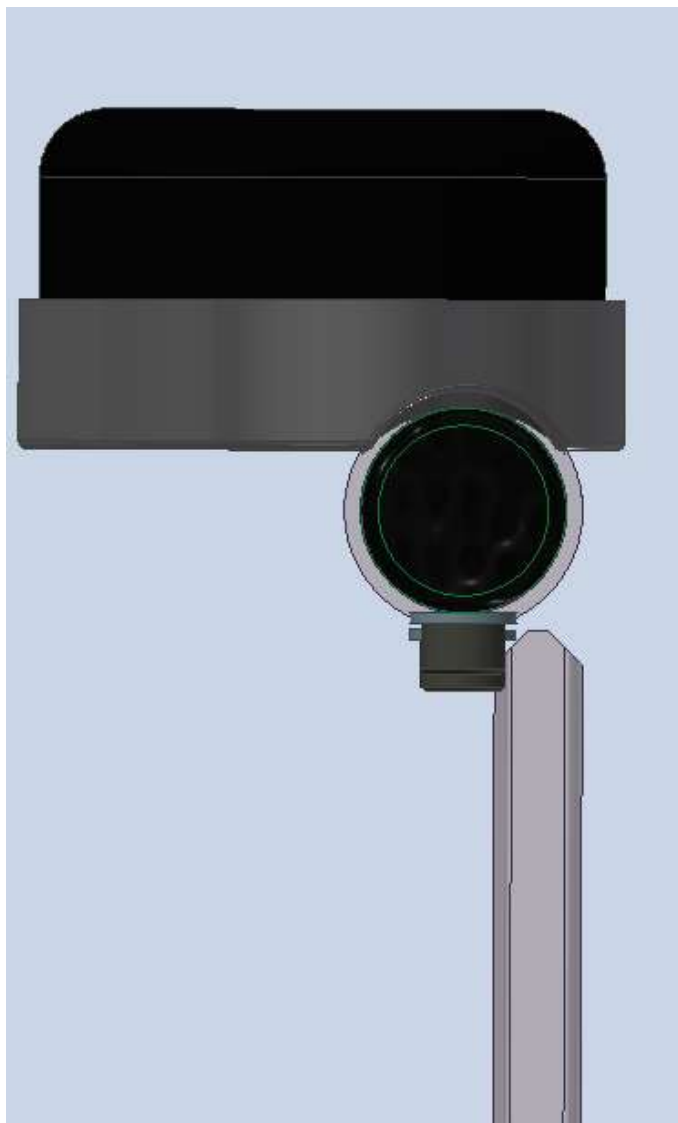

Description: Inversé le sens de fixation des garnitures sur les appui-bras afin que les garnitures soient plus rapprochées de l'occupant.

<i>Oasis PC</i>	<i>Oasis PCM</i>	<i>Oasis PP</i>	<i>Oasis PC-03</i>
✓	✓	✓	✓


Extension d'appui-bras



Description: Extension installé sur le bout de l'appui-bras en « U » afin d'avancer la garniture.

<i>Oasis PC</i>	<i>Oasis PCM</i>	<i>Oasis PP</i>	<i>Oasis PC-03</i>
✓	✓	✓	✓


Appui-bras en « U » renforcés

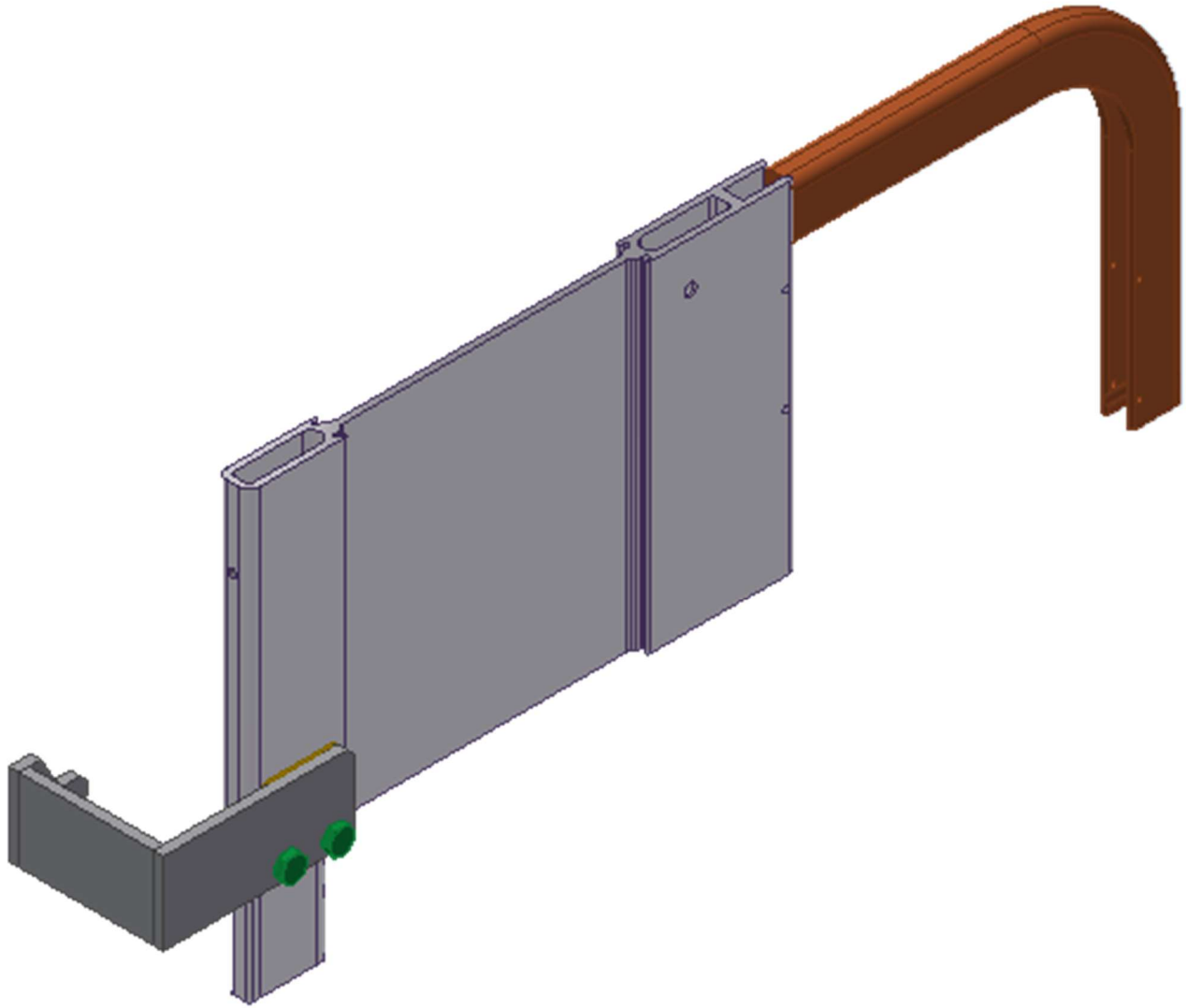

Description: Installation d'un support à l'arrière de la partie basse de l'appui-bras. Le support retient l'appui-bras lorsqu'il y a une force latérale (exemple: lorsque l'utilisateur pousse sur les appui-bras pour se lever).

<i>Oasis PC</i>	<i>Oasis PCM</i>	<i>Oasis PP</i>	<i>Oasis PC-03</i>
✓	✓	✓	✓

Hauteur d'ajustement 6 à 8 pouces

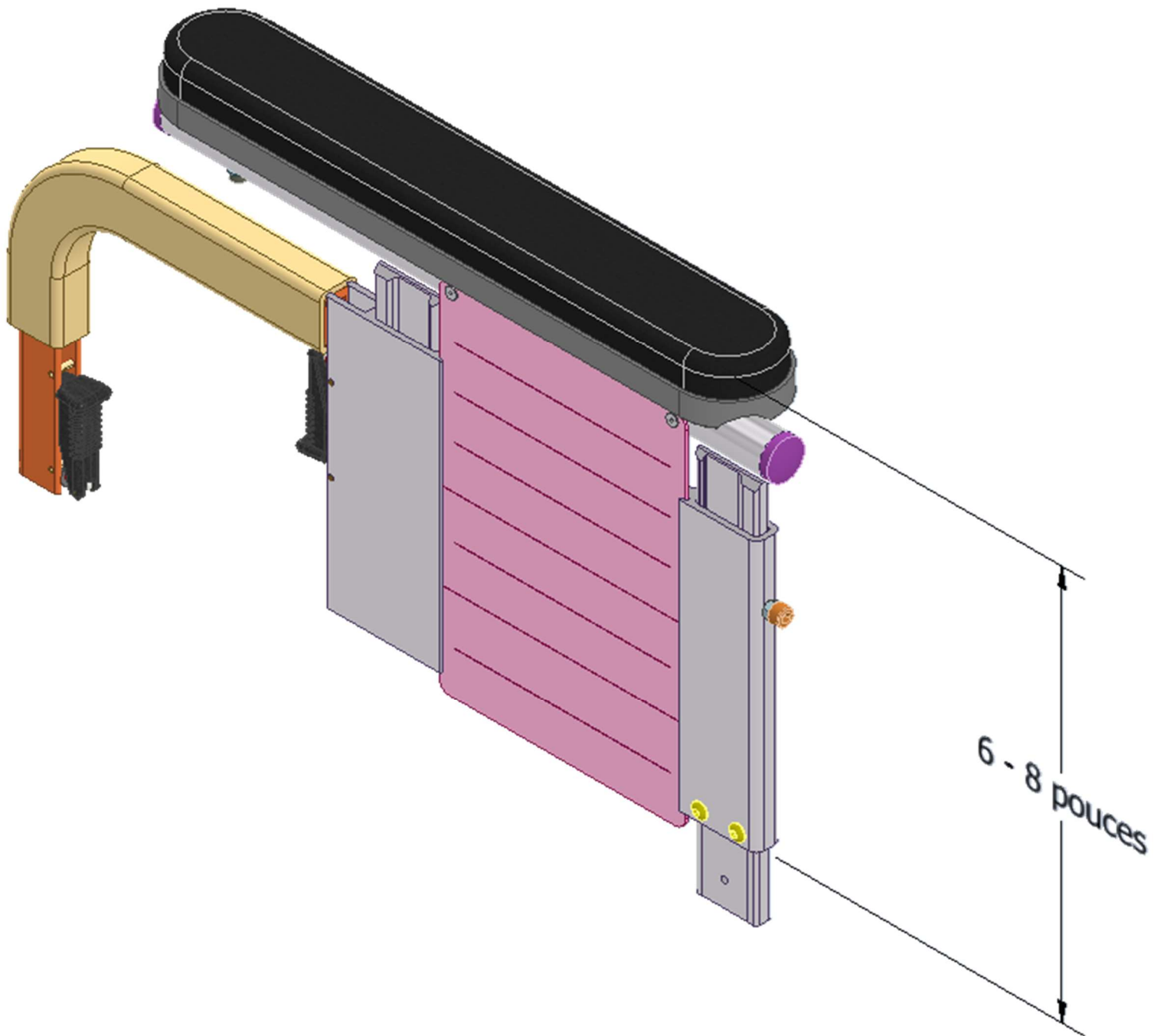


Description: Diminution de la hauteur des appui-bras afin d'obtenir une plage de hauteurs d'ajustement entre 6 et 8 pouces.


<i>Oasis PC</i>	<i>Oasis PCM</i>	<i>Oasis PP</i>	<i>Oasis PC-03</i>
✓	✓	✓	✓

Garniture


Profilé en gel

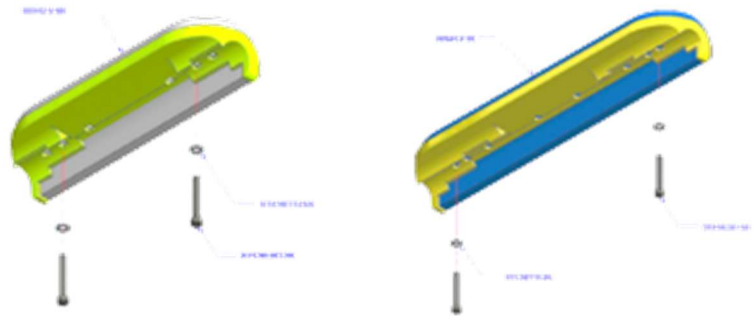


Profilé

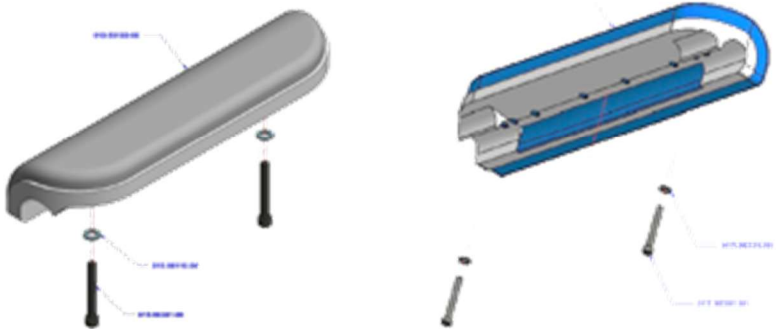

Plate

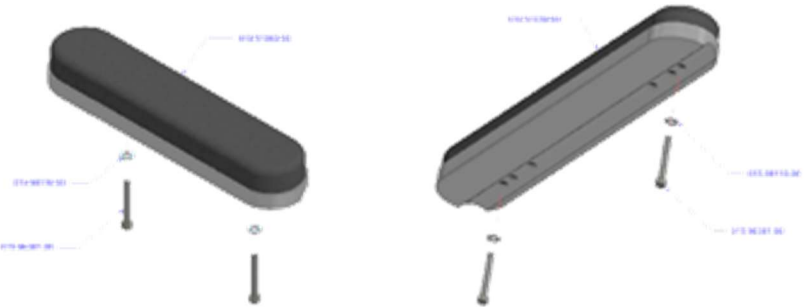


Tubulaire

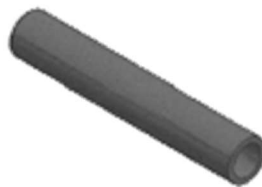

Description: Possibilité d'avoir un type et une longueur d'appui-bras d'un côté (exemple: garniture profilé court à gauche) et un autre type et/ou longueur de l'autre côté (exemple: garniture plate longue à droite).

Oasis PC	Oasis PCM	Oasis PP	Oasis PC-03
✓	✓	✓	✓


Déclencheur tétra

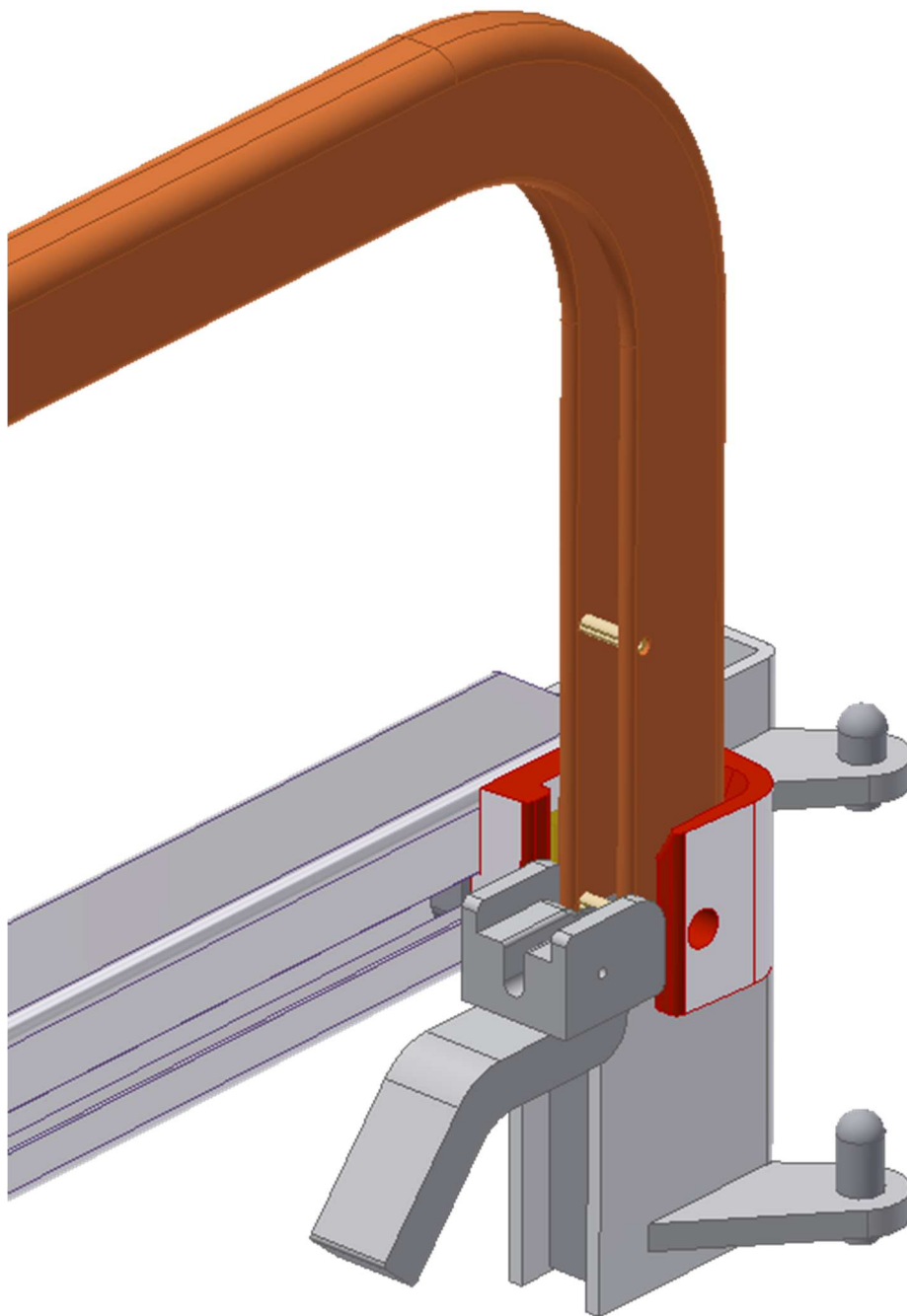

Description: Déclencheur pour appui-bras en « U » qui se débarre lorsque pivoter vers le bas. Le déclenchement de l'appui-bras se fait donc en pivotant le tétra et non en appuyant sur le déclencheur standard.

<i>Oasis PC</i>	<i>Oasis PCM</i>	<i>Oasis PP</i>	<i>Oasis PC-03</i>
✓	✓	✓	✓


Compensateur selon le mouvement du dossier

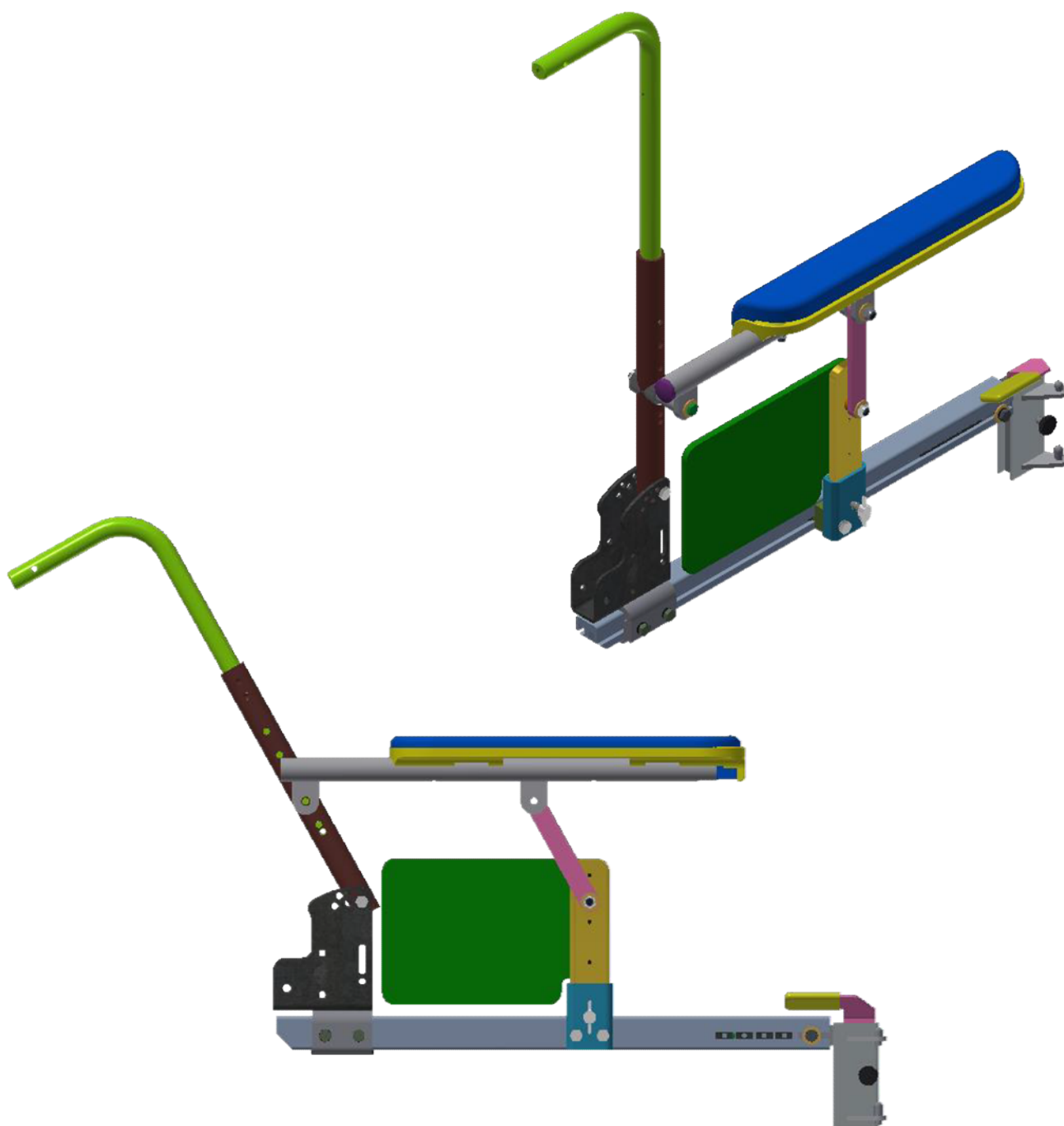

Description: Grâce au mécanisme de l'appui-bras, l'accoudoir suit le mouvement du dossier et tout en restant parallèle au sol. La distance entre le dossier et la manette reste donc stable même lors de l'inclinaison du dossier.

<i>Oasis PC</i>	<i>Oasis PCM</i>	<i>Oasis PP</i>	<i>Oasis PC-03</i>
✓	✓	✓	✓


Espaceurs pour élargir la largeur d'assise

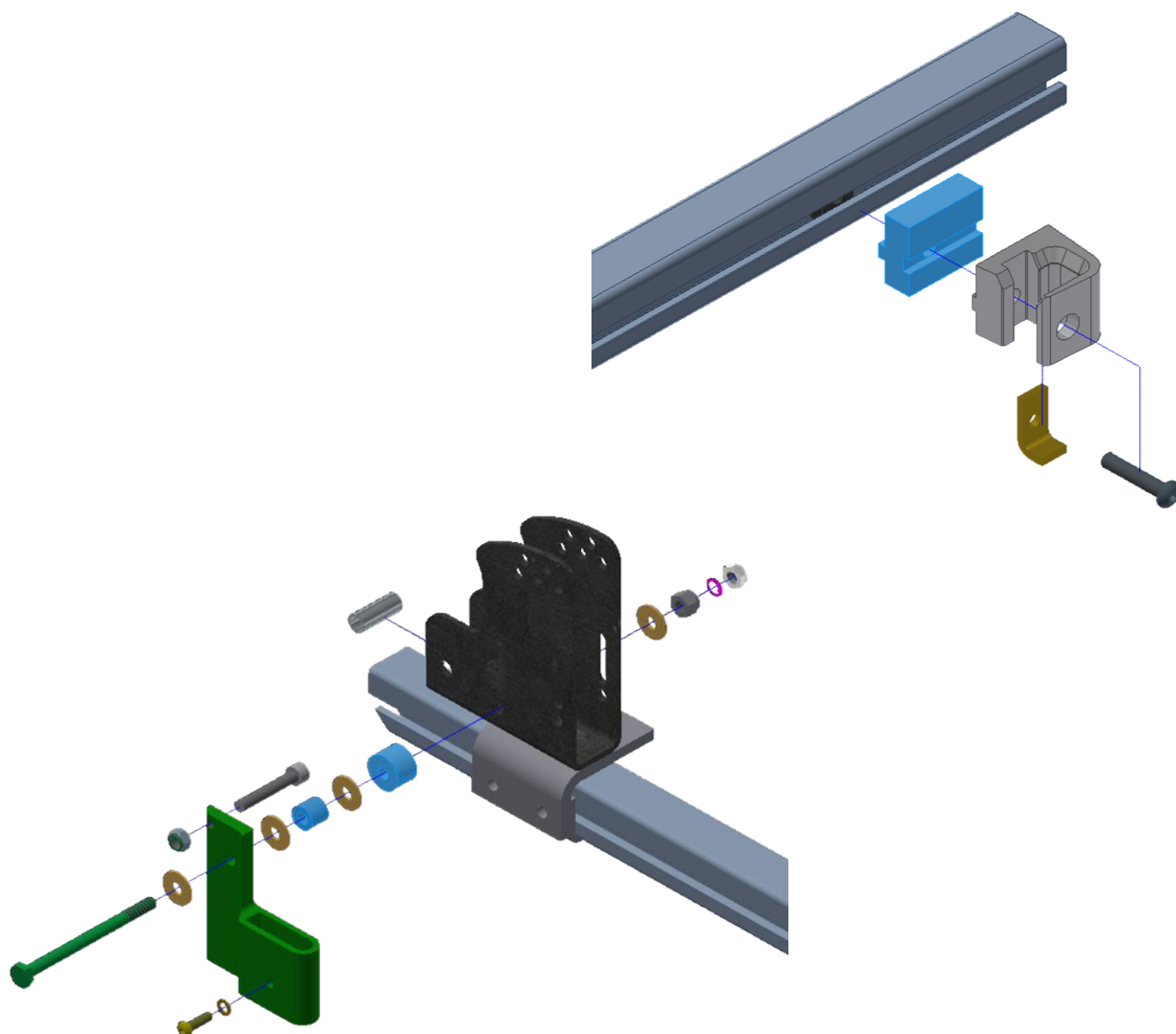

Description: Ajout d'espaceurs sur les socles avant et arrière des appui-bras en « U ». Ces espaceurs augmentent de ½ pouce de chaque côté (total 1") la distance entre les appui-bras.

<i>Oasis PC</i>	<i>Oasis PCM</i>	<i>Oasis PP</i>	<i>Oasis PC-03</i>
✓	✓	✓	✓

Appui-bras suivant le dossier motorisé

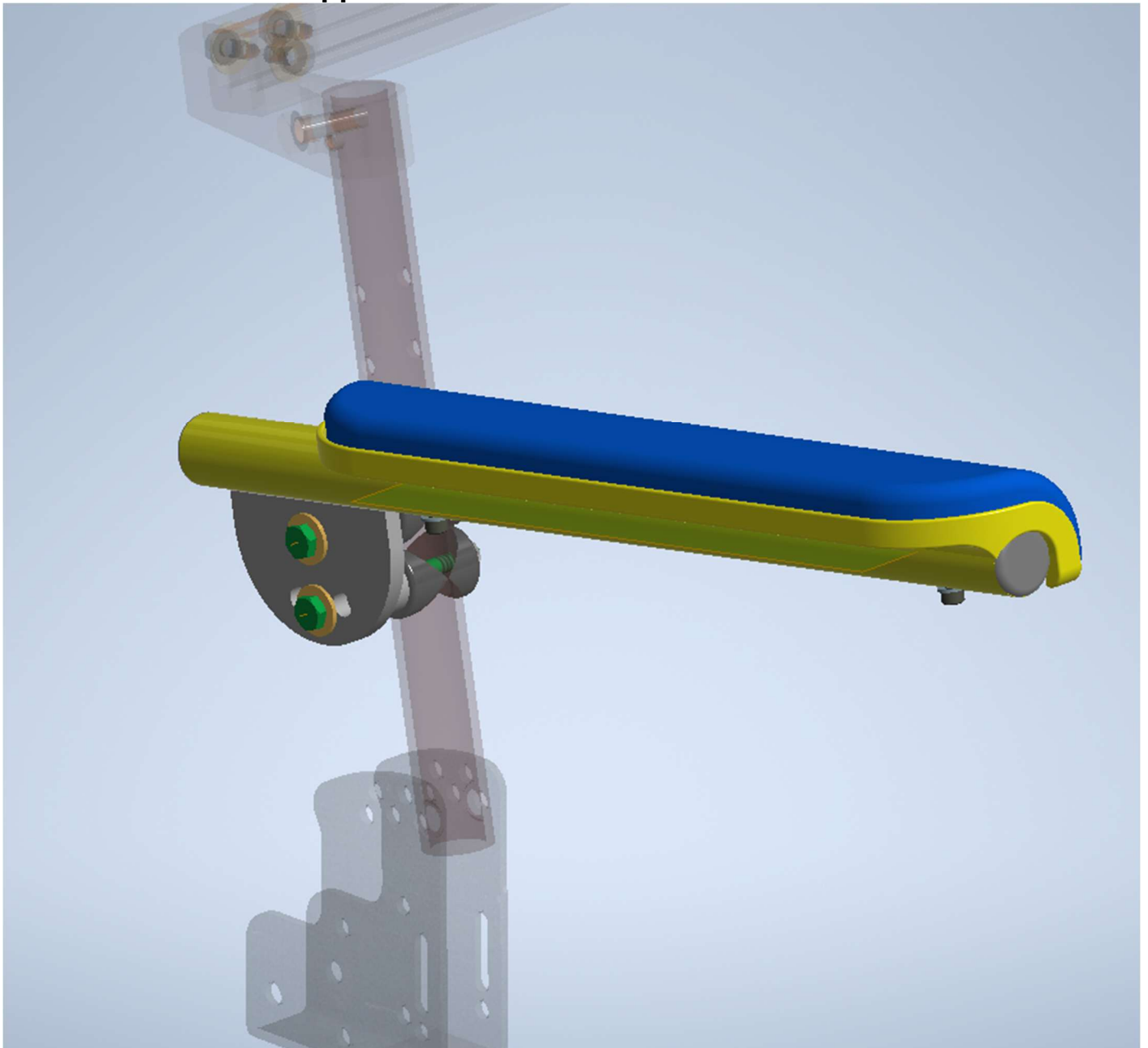

Description: L'accoudoir fixé sur la canne de dos suit le mouvement du dossier selon l'inclinaison désirée. Il est également possible d'ajuster l'angle de l'accoudoir selon trois configurations (-25 °, 0 °, 25 °).

<i>Oasis PC</i>	<i>Oasis PCM</i>	<i>Oasis PP</i>	<i>Oasis PC-03</i>
✓	✓	✓	✓

REPOSE-JAMBES


Angle d'inclinaison sur-mesure



Description: L'appui-jambe peut être fixé à un angle ou une plage d'angles prédéfinis. Par exemple, appui-jambe 50° ou appui-jambe 10°-45 °. L'angle doit être compris entre 0° (jambe à l'horizontale) et 90° (jambe à la verticale)

<i>Oasis PC</i>	<i>Oasis PCM</i>	<i>Oasis PP</i>	<i>Oasis PC-03</i>

Ajout de la palette centrale non-motorisée

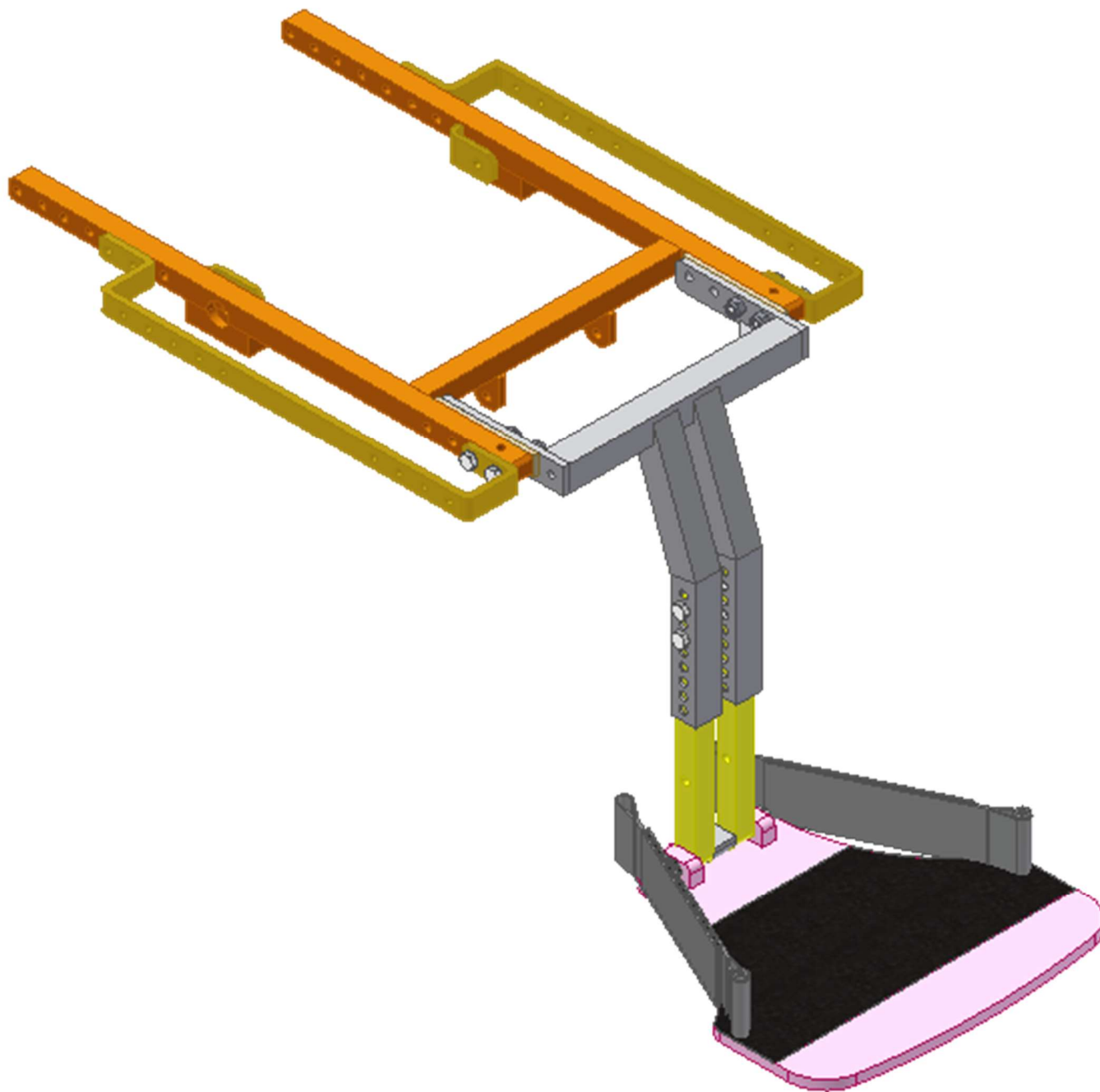

Description: Remplacement des appui-jambes standards par la palette centrale non-motorisée.

<i>Oasis PC</i>	<i>Oasis PCM</i>	<i>Oasis PP</i>	<i>Oasis PC-03</i>
✓	✓	✓	✓


Configuration gauche/droite différente



Description: Possibilité d'avoir un type et une longueur d'appui-jambe d'un côté (exemple: standard 70 degrés à droite) et un autre type et/ou longueur de l'autre côté (exemple: élévateur- compensateur à gauche).

<i>Oasis PC</i>	<i>Oasis PCM</i>	<i>Oasis PP</i>	<i>Oasis PC-03</i>
✓	✓	✓	✓


Déclencheur sur-mesure

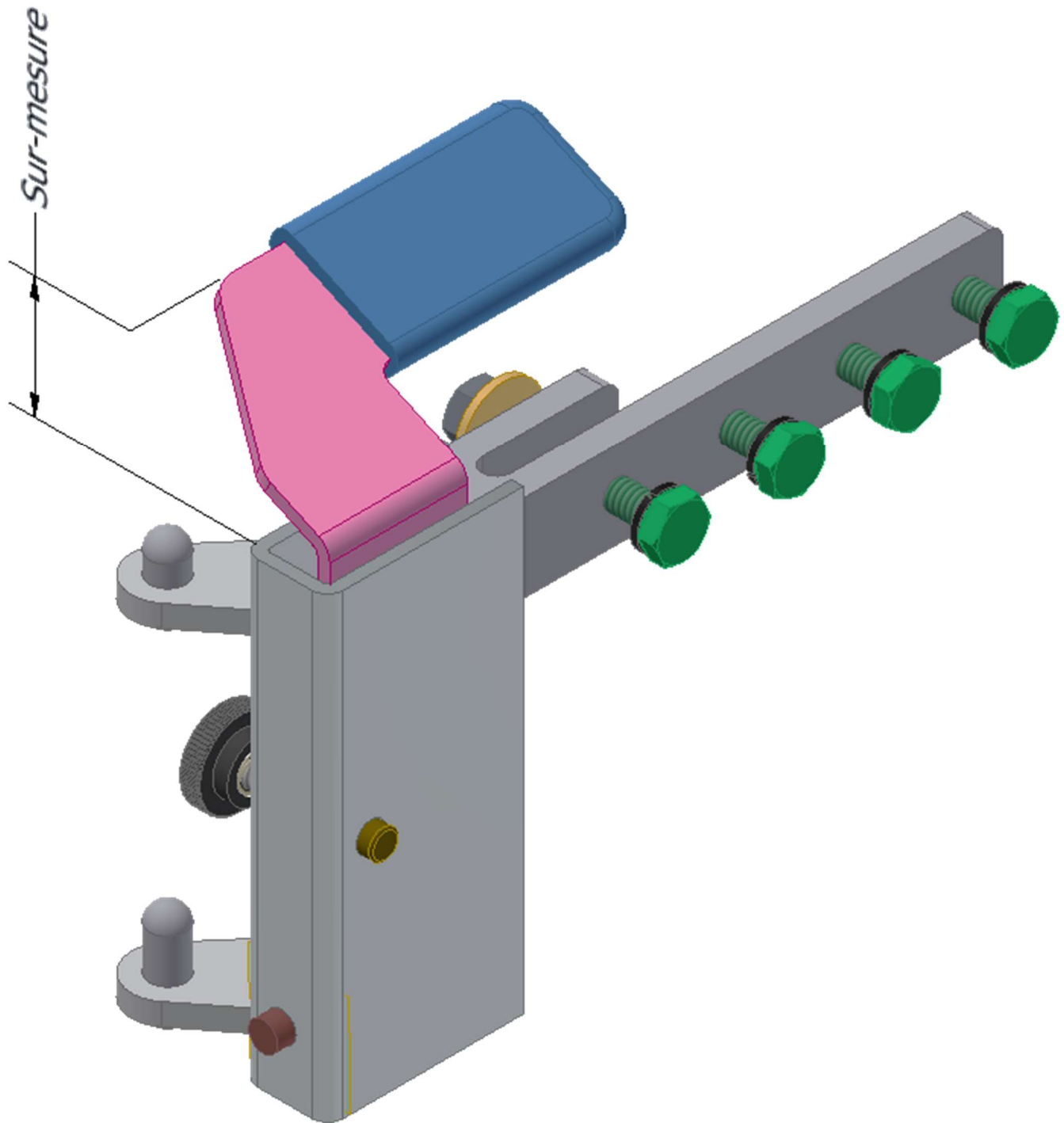

Description: La hauteur du déclencheur d'appui-jambe peut être fabriquée sur-mesure.

<i>Oasis PC</i>	<i>Oasis PCM</i>	<i>Oasis PP</i>	<i>Oasis PC-03</i>
✓	✓	✓	✓

Longueur d'ajustement sur-mesure

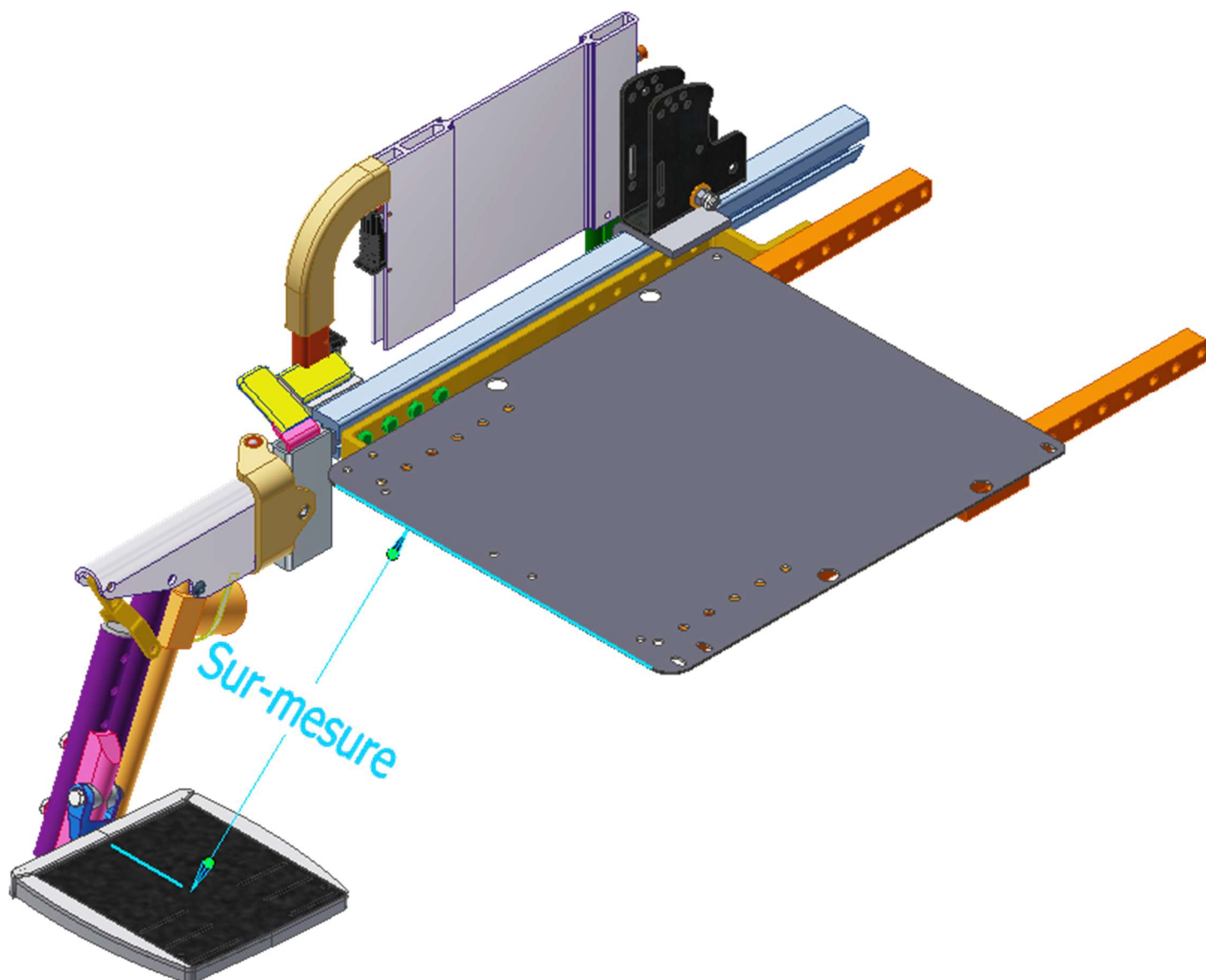

Description: Possibilité d'obtenir une longueur d'ajustement des appui-jambes en dehors des plages standards. Disponible avec tous les types d'appui-jambes.

<i>Oasis PC</i>	<i>Oasis PCM</i>	<i>Oasis PP</i>	<i>Oasis PC-03</i>
✓	✓	✓	✓


Repose-pieds en aluminium



Description: Repose-pieds en aluminium de longueur standard ou surdimensionnée.

<i>Oasis PC</i>	<i>Oasis PCM</i>	<i>Oasis PP</i>	<i>Oasis PC-03</i>
✓	✓	✓	✓


Palette centrale sur-mesure

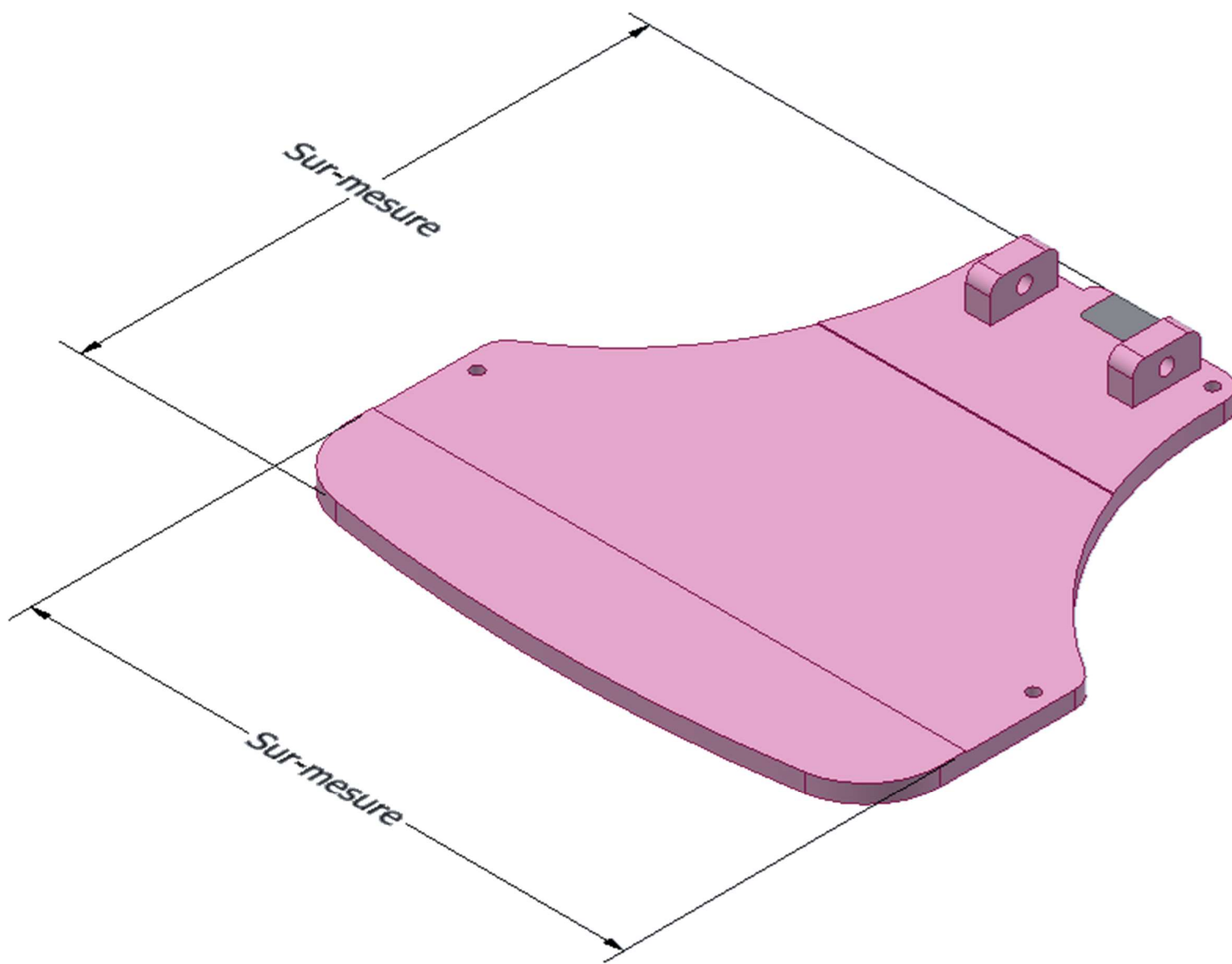

Description: Les dimensions de la palettes centrales peuvent être ajustées selon les besoins.

<i>Oasis PC</i>	<i>Oasis PCM</i>	<i>Oasis PP</i>	<i>Oasis PC-03</i>
✓	✓	✓	✓


Appui-mollet pour palette centrale

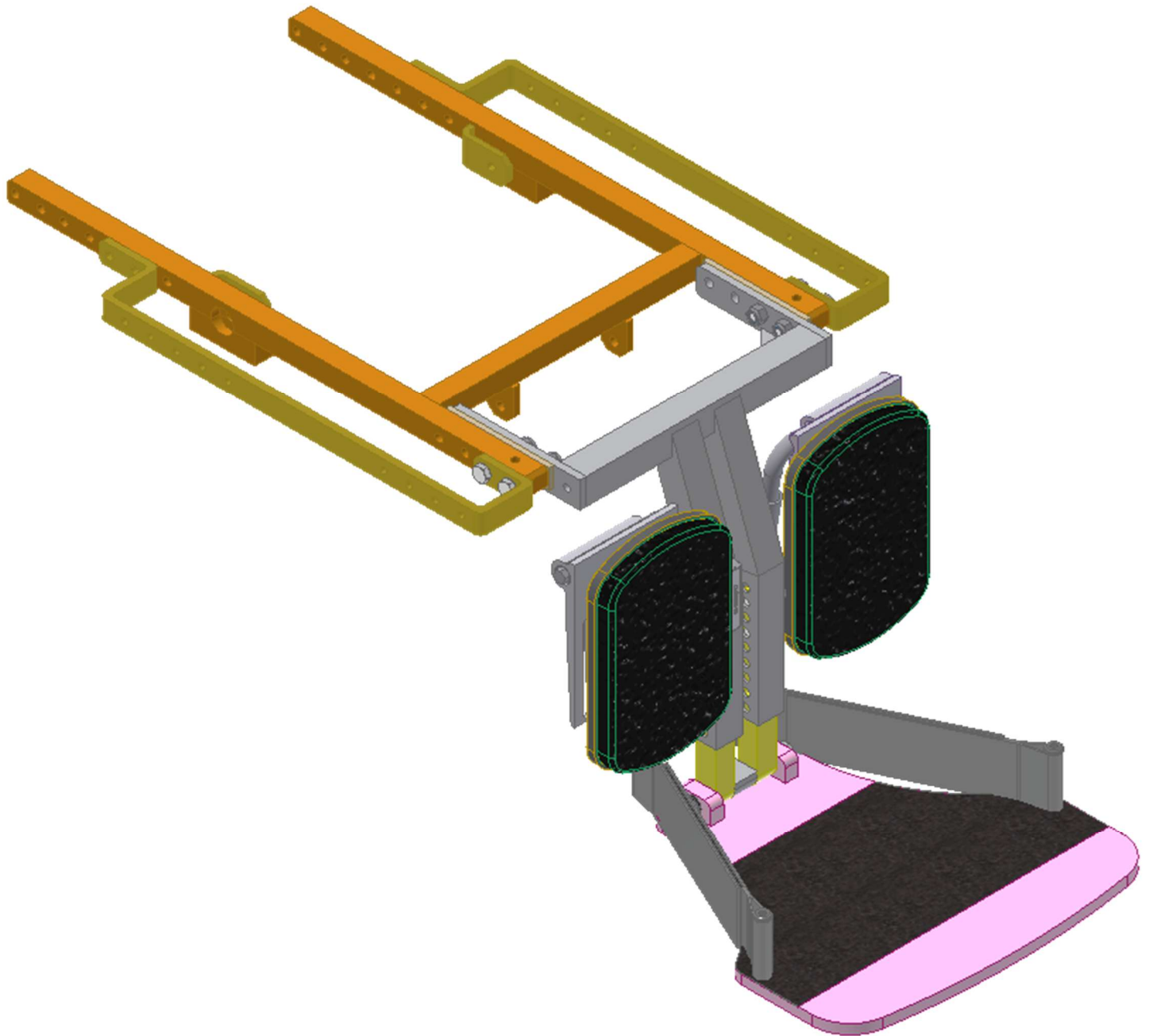

Description: Possibilité d'obtenir des appui-mollets sur la palette centrale.

<i>Oasis PC</i>	<i>Oasis PCM</i>	<i>Oasis PP</i>	<i>Oasis PC-03</i>
✓	✓	✓	✓


Cornière d'appui-jambe renforcée

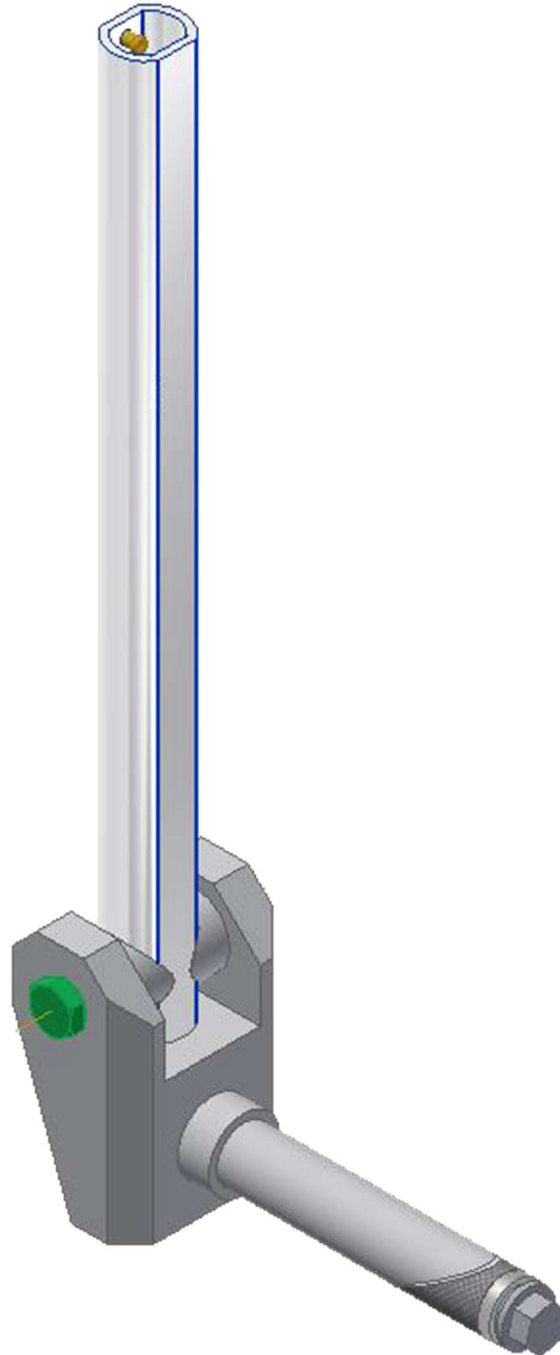

Description: Renforcement des cornières d'appui-jambes dans le cas, par exemple, de spasmes résultants en de forts coups de pieds donnés sur les appui-pieds.

<i>Oasis PC</i>	<i>Oasis PCM</i>	<i>Oasis PP</i>	<i>Oasis PC-03</i>
✓	✓	✓	✓

Protecteur compatible pour appui-pied

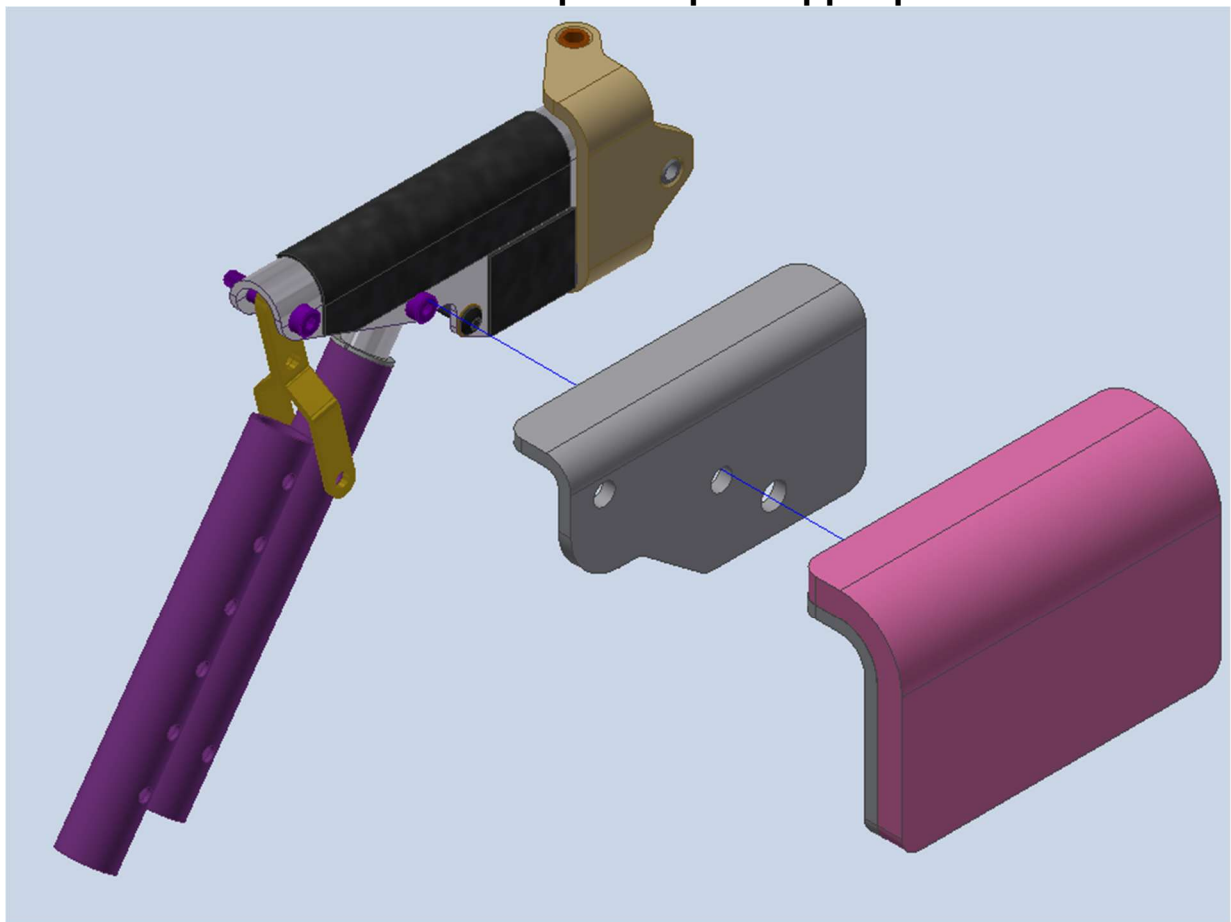


Description: Protège les genoux de l'utilisateur des frottements contre le mécanisme et les vis.

<i>Oasis PC</i>	<i>Oasis PCM</i>	<i>Oasis PP</i>	<i>Oasis PC-03</i>
✓	✓	✓	✓

CEINTURE

Boucle de ceinture style avion

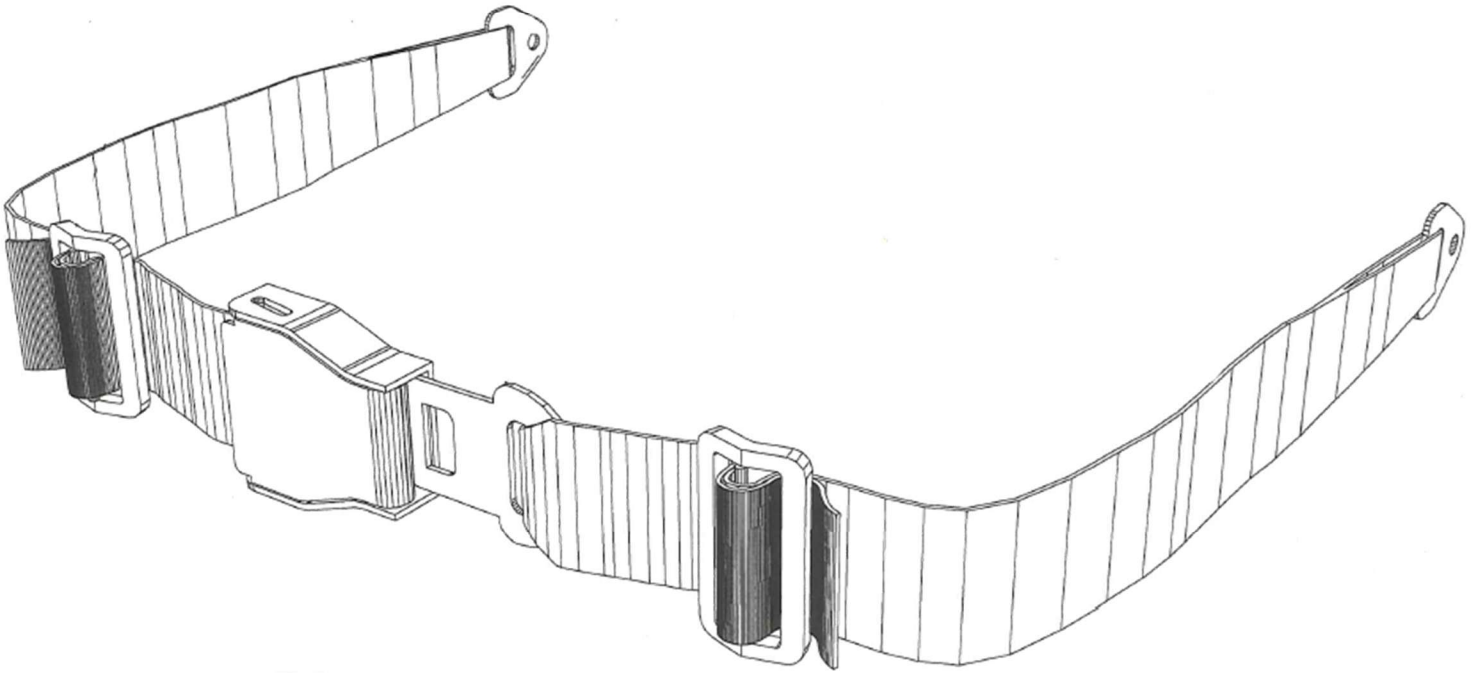

Description: Boucle pour ceinture de positionnement style avion.

Note: La boucle de ceinture de style avion n'est pas accréditée ISO 7176-19. Elle doit donc servir uniquement au positionnement.

<i>Oasis PC</i>	<i>Oasis PCM</i>	<i>Oasis PP</i>	<i>Oasis PC-03</i>
✓	✓	✓	✓

BASCULE D'ASSISE

Bloqueur de bascule antérieure et postérieure



Description: Installation d'un interrupteur au mercure permettant un blocage de la bascule antérieure ou postérieure. La course de la bascule pourrait ainsi être bloquée, par exemple, sur une plage de 5 à 30 degrés

<i>Oasis PC</i>	<i>Oasis PCM</i>	<i>Oasis PP</i>	<i>Oasis PC-03</i>
✓	✓	✓	✓

ACCESSOIRES ÉLECTRONIQUES

Contrôle externe pour 1 accessoire

Photo à venir

Description: Boîtier qui permet le branchement par une prise de type «phone jack» d'un interrupteur externe afin de contrôler un accessoire sans l'aide du boîtier de contrôle. Plusieurs types d'interrupteurs disponibles (voir section *Interrupteurs externes*)

<i>Oasis PC</i>	<i>Oasis PCM</i>	<i>Oasis PP</i>	<i>Oasis PC-03</i>
✓	✓	✓	✓

Interrupteurs externes



Buddy Button



Micro-light

Autres choix disponibles selon le besoin



Egg-Switch



Cup Switch

Description: Plusieurs types d'interrupteurs disponibles pour le contrôle d'un ou plusieurs accessoires sans l'aide du boîtier de contrôle. Nécessite le contrôle externe pour 1 accessoire (voir section *contrôle externe pour 1 accessoire*)

<i>Oasis PC</i>	<i>Oasis PCM</i>	<i>Oasis PP</i>	<i>Oasis PC-03</i>
✓	✓	✓	✓

Boîtier de contrôle d'accessoires à 5 interrupteurs




Description: Boîtier de contrôle composé de 5 interrupteurs pouvant servir au contrôle de 5 accessoires différents.

Note: Requiert le boîtier de commande à écran 3,5" R-Net (standard au formulaire) et une programmation de ce boîtier de commande.

<i>Oasis PC</i>	<i>Oasis PCM</i>	<i>Oasis PP</i>	<i>Oasis PC-03</i>
✓	✓	✓	✓

Boîte de commande opérée par un assistant

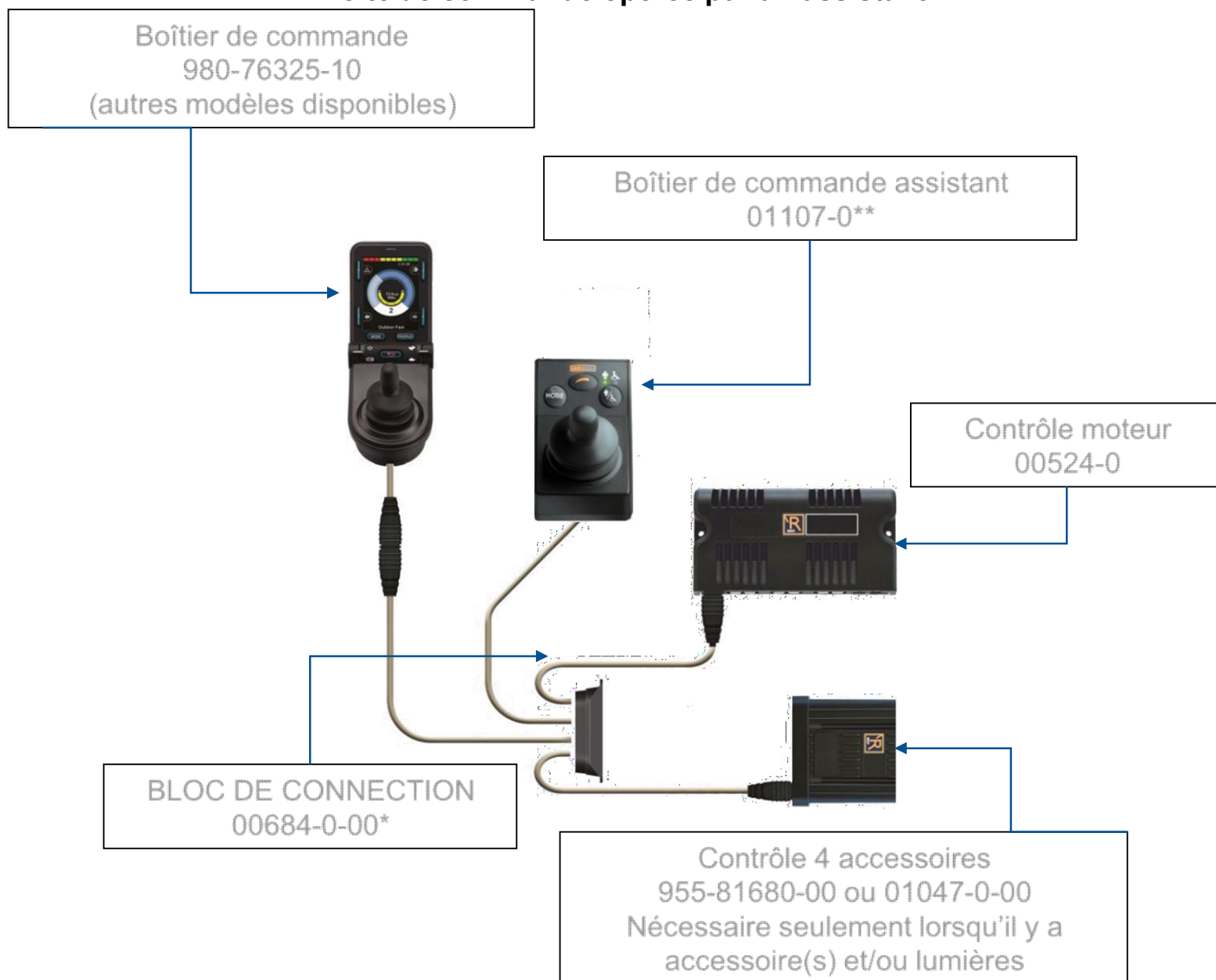

*Non nécessaire lorsqu'il y a seulement la boîte de commande principale.

**Le support de boîte de commande assistant est offert séparément (00446-1)

Description: Boîtier de commande supplémentaire opéré par un assistant. Le contrôle aidant est standard au formulaire depuis 2021 et peut-être ajouté en hors-standard sur les fauteuils des années précédentes.

Oasis PC	Oasis PCM	Oasis PP	Oasis PC-03
✓	✓	✓	✓

Module IOM



Description: Module permettant le contrôle d'accessoires externes (exemple: télévision, lumières, ordinateur, etc) à partir du boîtier de contrôle du fauteuil. Permet aussi, à l'inverse, de contrôler le mouvement du fauteuil à partir d'interrupteurs externes.

Oasis PC	Oasis PCM	Oasis PP	Oasis PC-03
✓	✓	✓	✓


Chargeur USB



Description: Chargeur avec 2 prises USB 3Amp

<i>Oasis PC</i>	<i>Oasis PCM</i>	<i>Oasis PP</i>	<i>Oasis PC-03</i>
✓	✓	✓	✓

Programmeur sans-fil R-NET

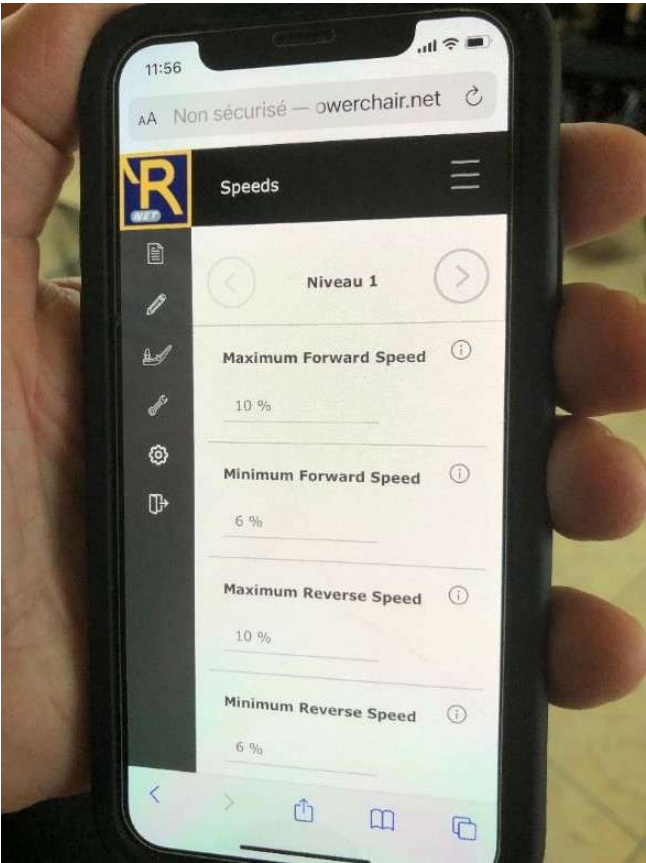

Description: Ce module (à droite) lorsque branché sur un fauteuil émet un signal wifi pouvant être capté par un téléphone intelligent (aucune application requise). Il est donc possible de programmer et enregistrer un programme à partir de ce téléphone.

Oasis PC	Oasis PCM	Oasis PP	Oasis PC-03
✓	✓	✓	✓

BOITES DE COMMANDE

Boîtier de commande LED avec option lumières



Description: Boîtier de commande LED sans écran, avec bouton pour le contrôle des lumières

<i>Oasis PC</i>	<i>Oasis PCM</i>	<i>Oasis PP</i>	<i>Oasis PC-03</i>
✓	✓	✓	✓


Boîtier de commande sans potentiomètre et sans Tuggle



Description: Boîtier de commande avec écran, sans potentiomètre et sans interrupteur tuggle à la base du boîtier.

<i>Oasis PC</i>	<i>Oasis PCM</i>	<i>Oasis PP</i>	<i>Oasis PC-03</i>
✓	✓	✓	✓

Boîtier de commande de type « Champignon »

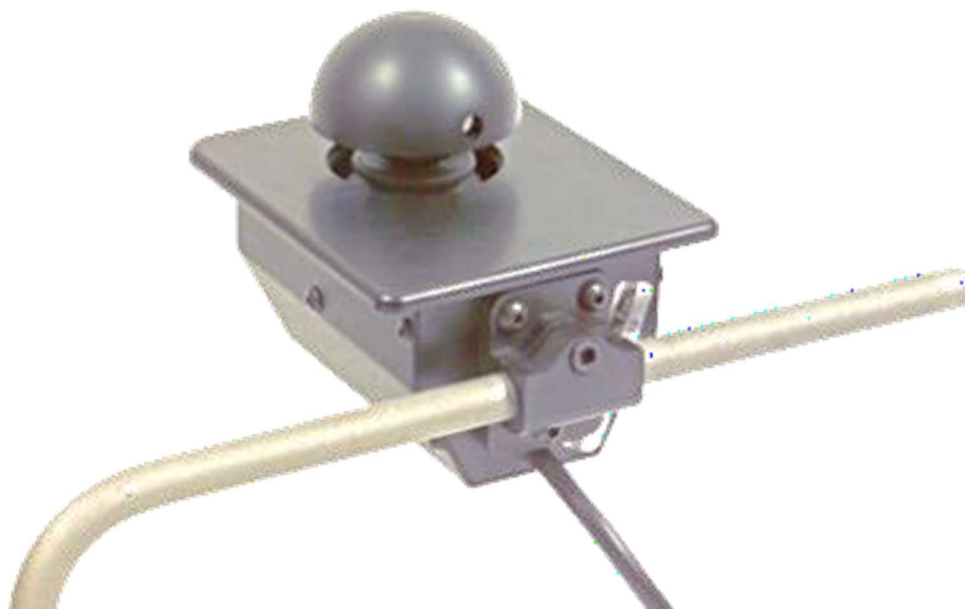

Description: Boîtier de commande avec embout de style « champignon ».

<i>Oasis PC</i>	<i>Oasis PCM</i>	<i>Oasis PP</i>	<i>Oasis PC-03</i>
✓	✓	✓	✓

Boîtier de commande de type « Micro-Joystick »



Description: Boîtier de commande de petit format de type « Micro-Joystick ».

Oasis PC	Oasis PCM	Oasis PP	Oasis PC-03
✓	✓	✓	✓

Boîtier de commande de type « Heavy Duty » »



Description: Cet assemblage très robuste peut remplacer l'embout de contrôle de tous les boîtiers de commande. Étant plus robuste, offrira plus de résistance aux chocs (en cas de spasmes par exemple).

<i>Oasis PC</i>	<i>Oasis PCM</i>	<i>Oasis PP</i>	<i>Oasis PC-03</i>
✓	✓	✓	✓

Modification de la configuration des boutons de commandes



(Standard



P81139MK1



P81139MK2



P81139MK3



P81139MK4



P81139MK5



P81139MK6

Description: Possibilité de modifier la configuration des boutons du centre du boîtier de commande à écran de 3,5 pouces.

<i>Oasis PC</i>	<i>Oasis PCM</i>	<i>Oasis PP</i>	<i>Oasis PC-03</i>
✓	✓	✓	✓

EXTENSION DE MANETTE









Allonge de l'interrupteur de bascule de type «Tuggle»



Description: Allonge de l'interrupteur de bascule de type «Tuggle»

<i>Oasis PC</i>	<i>Oasis PCM</i>	<i>Oasis PP</i>	<i>Oasis PC-03</i>
✓	✓	✓	✓

Embout de boîtier de commande

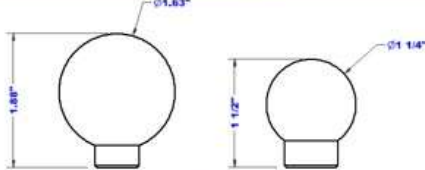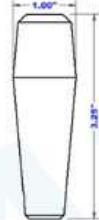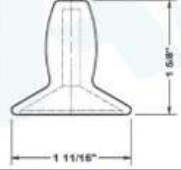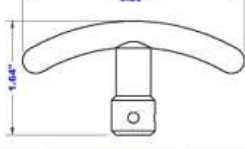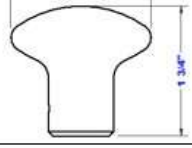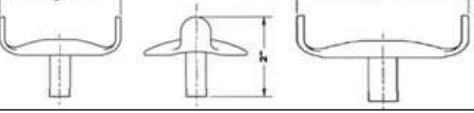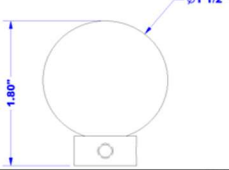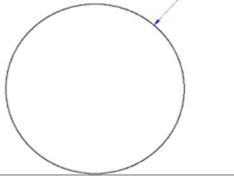Numéro de pièce	Description	Dessin	Dimensions
980-71020-00 (Grosse, Standard) 980-7060-00 (Petite, Hors-standard)	Boule		
980-71040-00 (Standard)	Bâtonnet		
955-71180-00 (Standard)	Conicosphérique		
980-71030-00 (Standard)	En « T »		
980-70670-00 (Standard)	Champignon		
00693-0-00 (3", Standard) 00694-0-00 (4", Hors-Standard)	En « U »		
Hors-Standard	Balle en mousse 1.5"		
Hors-Standard	Balle en mousse 2.6"		

Description: En plus des embouts de boîtier de commande offerts au formulaire, plusieurs autres embouts sont disponibles en hors-standard.

Oasis PC	Oasis PCM	Oasis PP	Oasis PC-03
			

COMMANDES ADAPTÉES

Contrôle pied



Description: Possibilité de contrôler, avec le pied, le mouvement du fauteuil ainsi que tous les accessoires. Le boîtier de contrôle standard est alors facultatif.

Note: Requiert l'interface pour commande adaptée avec affichage (Omni 2) disponible sur le formulaire de commande standard.

<i>Oasis PC</i>	<i>Oasis PCM</i>	<i>Oasis PP</i>	<i>Oasis PC-03</i>
✓	✓	✓	✓

Contrôle céphalique à capteurs de proximité



Description: Possibilité de contrôler, avec la tête, le mouvement du fauteuil ainsi que tous les accessoires. Le boîtier de contrôle standard est alors facultatif. Les interrupteurs mécaniques du contrôle céphalique standard sont remplacés par des capteurs de proximité qui augmentent le confort et la sensibilité.

Note: Les ailettes sur le côté de la tête sont habituellement courbées, mais des ailettes droites sont aussi offertes. Requiert l'interface pour commande adaptée avec affichage (Omni 2) disponible sur le formulaire de commande standard.

<i>Oasis PC</i>	<i>Oasis PCM</i>	<i>Oasis PP</i>	<i>Oasis PC-03</i>
✓	✓	✓	✓

Contrôle menton



Description: Possibilité de contrôler, à l'aide du boîtier de commande de type «mini-joystick» positionné sur un support près de menton, le mouvement du fauteuil ainsi que tous les accessoires. Le boîtier de contrôle standard est alors facultatif.

Note: Requiert l'interface pour commande adaptée avec affichage (Omni 2) disponible sur le formulaire de commande standard.

<i>Oasis PC</i>	<i>Oasis PCM</i>	<i>Oasis PP</i>	<i>Oasis PC-03</i>
✓	✓	✓	✓

Contrôle plastron



Description: Possibilité de contrôler, à l'aide du boîtier de commande de type «mini-joystick» positionné sur un plastron près de menton, le mouvement du fauteuil ainsi que tous les accessoires. Le boîtier de contrôle standard est alors facultatif.

Note: Requiert l'interface pour commande adaptée avec affichage (Omni 2) disponible sur le formulaire de commande standard.

<i>Oasis PC</i>	<i>Oasis PCM</i>	<i>Oasis PP</i>	<i>Oasis PC-03</i>
✓	✓	✓	✓

Contrôle souffle



Description: Possibilité de contrôler, avec le souffle, le mouvement du fauteuil ainsi que tous les accessoires. Le boîtier de contrôle standard est alors facultatif.

Note: Requiert l'interface pour commande adaptée avec affichage (Omni 2) disponible sur le formulaire de commande standard.

<i>Oasis PC</i>	<i>Oasis PCM</i>	<i>Oasis PP</i>	<i>Oasis PC-03</i>
✓	✓	✓	✓

ACCESSOIRES


Support de canne



Description: Support pour canne installé à l'arrière du fauteuil. Le support peut être installé du côté gauche ou du côté droit. Un harnais velcro vissé sur l'embout du montant de dossier permet de tenir la canne en place. Format sur-mesure aussi disponible pour canne quadripode.

<i>Oasis PC</i>	<i>Oasis PCM</i>	<i>Oasis PP</i>	<i>Oasis PC-03</i>
✓	✓	✓	✓

Support de bonbonne à oxygène

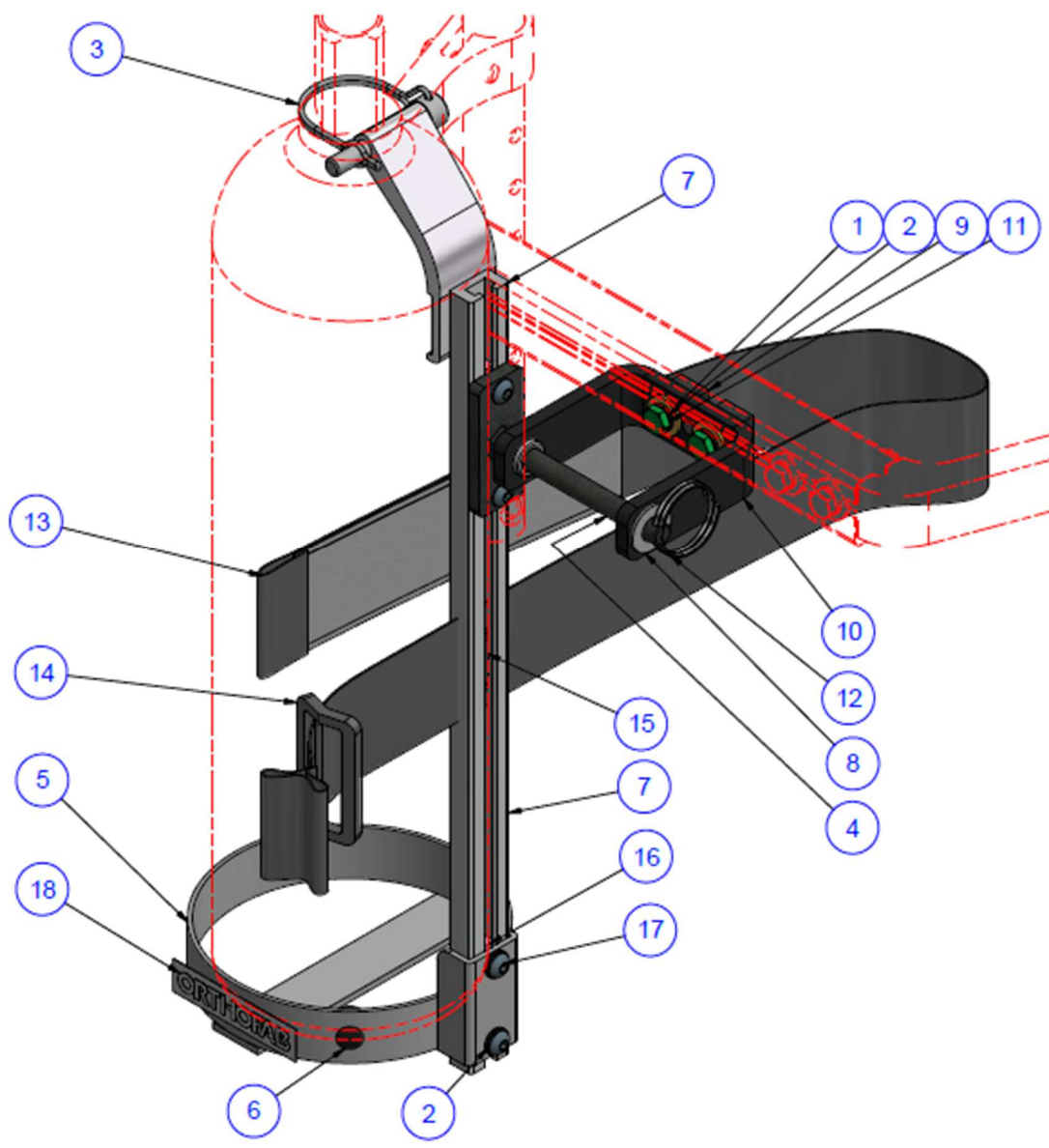


Description: Support pour une bonbonne à oxygène

Note: Une sécurité électronique supplémentaire est nécessaire pour les fauteuils équipés d'une bascule motorisée pour éviter tout conflit entre la bonbonne et la bascule. L'installation de cette sécurité doit se faire chez Orthofab puisqu'une programmation est aussi requise.

<i>Oasis PC</i>	<i>Oasis PCM</i>	<i>Oasis PP</i>	<i>Oasis PC-03</i>
✓	✓	✓	✓


Support à soluté

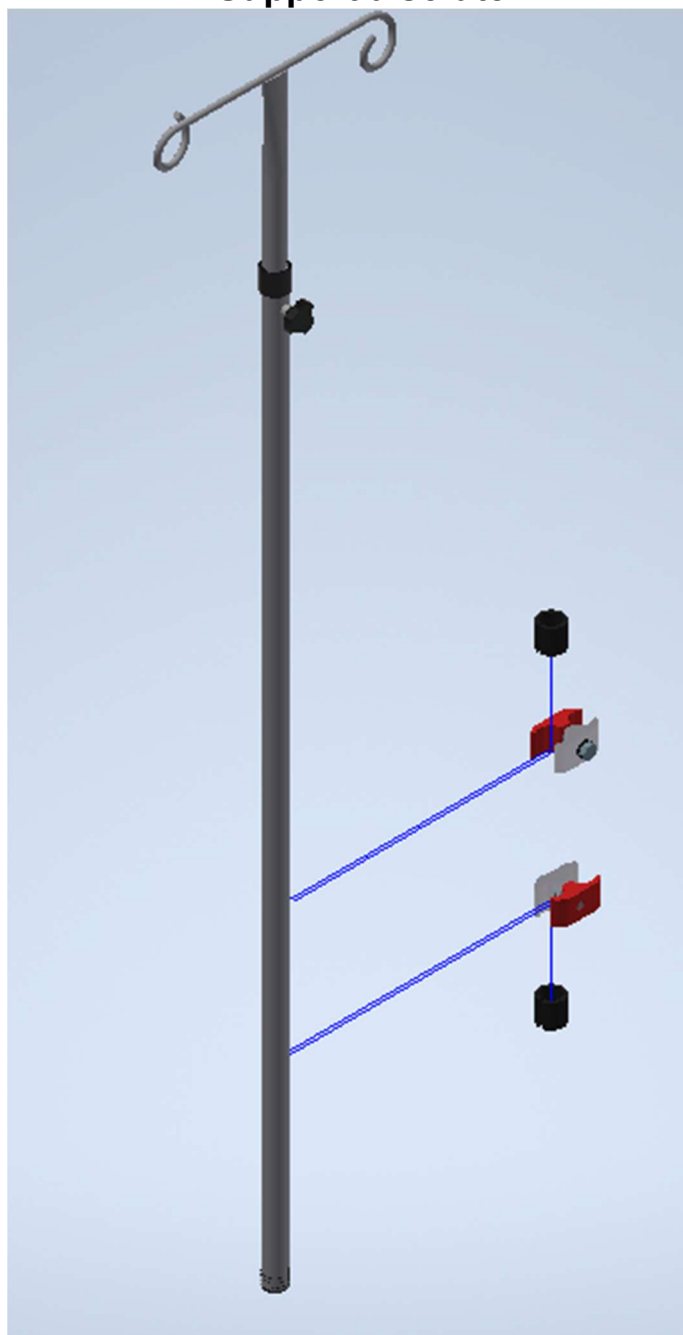

Description: Support se fixant sur les cannes de dossier. Tige ajustable en hauteur.

<i>Oasis PC</i>	<i>Oasis PCM</i>	<i>Oasis PP</i>	<i>Oasis PC-03</i>
✓	✓	✓	✓

Rétroviseur

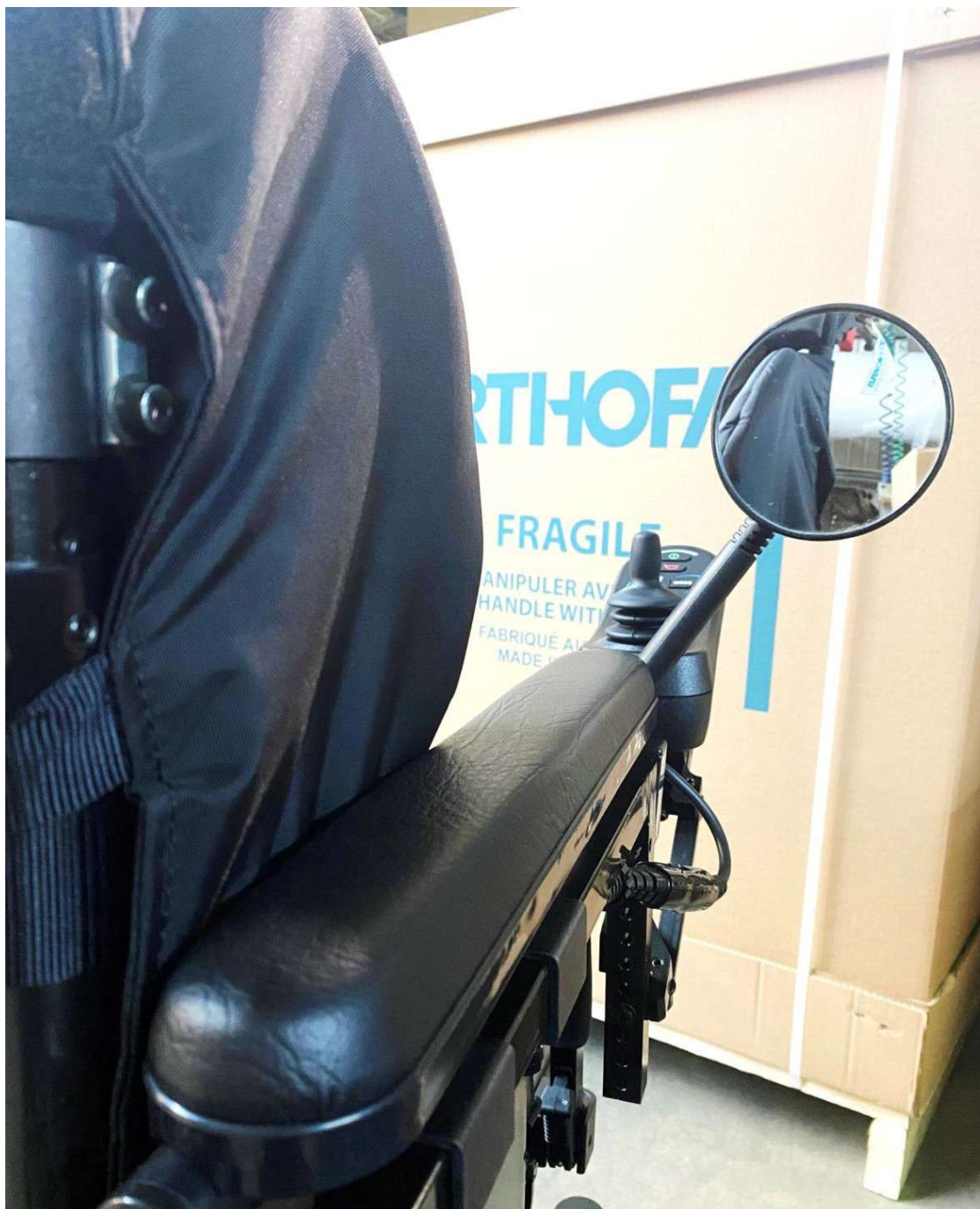

Description: Rétroviseur installé sur l'appui-bras (au choix à gauche ou à droite)

<i>Oasis PC</i>	<i>Oasis PCM</i>	<i>Oasis PP</i>	<i>Oasis PC-03</i>
✓	✓	✓	✓

Porte-gobelet



Description: Porte-gobelet pour bouteille ou tasse. Choix de couleur (noir ou bleu royal).

<i>Oasis PC</i>	<i>Oasis PCM</i>	<i>Oasis PP</i>	<i>Oasis PC-03</i>
✓	✓	✓	✓

Protecteur OMNI2



Description: Boîtier protecteur pour l'OMNI2. Choix de couleur (noir ou bleu royal).

<i>Oasis PC</i>	<i>Oasis PCM</i>	<i>Oasis PP</i>	<i>Oasis PC-03</i>
✓	✓	✓	✓